



BVI 3000

SNABBGUIDE TILL BLÄSVOLYM

BladderScan®
Instrument för urinblåsevolym


1. Starta Bladderscan BVI 3000 genom att trycka på strömknappen .

2. Tryck på **SCAN** på skärmen Huvudmeny.

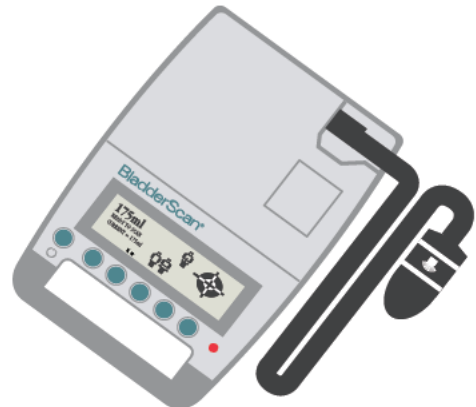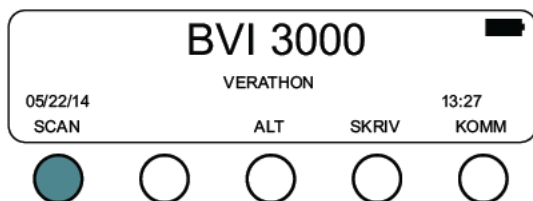

3. Tryck på knappen **Man/Kvinna**  på skärmen Scan för att välja patientens kön.


Använd detta läge endast för kvinnor som inte har genomgått hysterektomi. Använd det manliga alternativet för alla andra patienter.

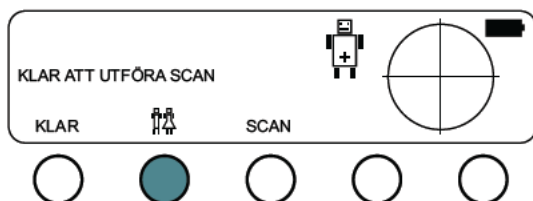

4. Låt patienten ligga på rygg med magmusklerna avslappnade.


5. Palpera patientens blygdbenssymfys.

6. Placera rikligt med gel på patientens mage ungefär 3 cm (1 tum) ovanför blygdbenssymfyen.

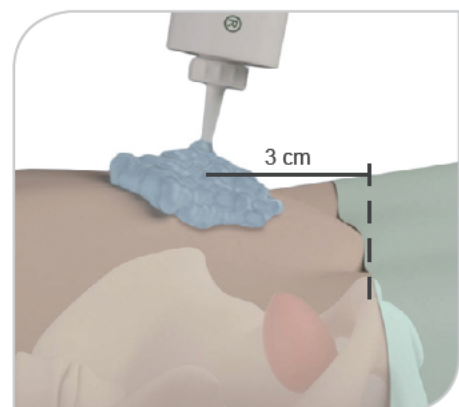

7. Placera sonden på gelen på patientens mage och se till att huvudet på patientsymbolen ( eller ) på sonden pekar mot patientens huvud.


8. Rikta sonden mot urinblåsans förväntade placering. På de flesta patienter innebär det att spetsen på sonden riktas mot patientens svansben.

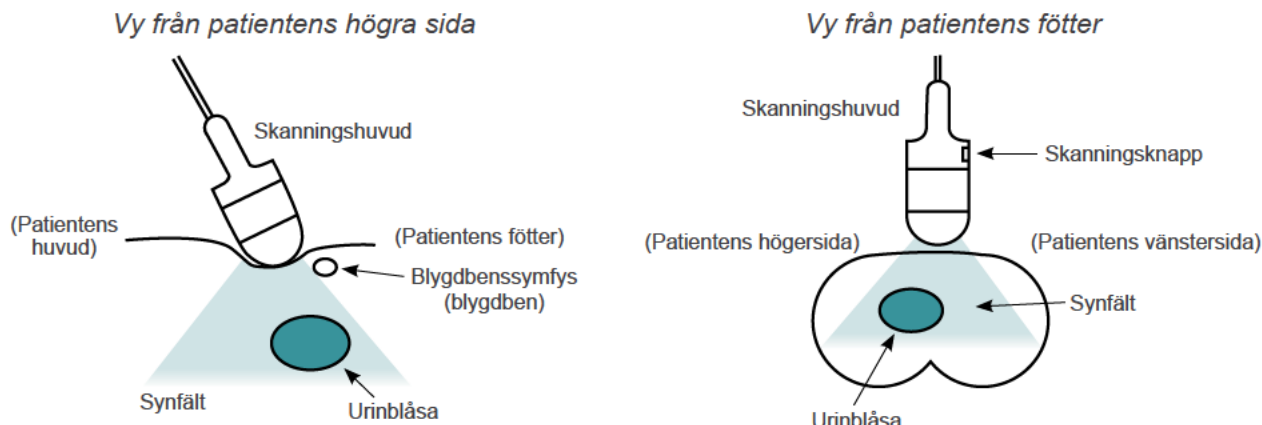

9. Tryck och släpp skanningsknappen  på sonden. Skanningen startar. Håll sonden stilla tills skanningen är klar.


10. Verifiera på skärmen Sikta att instrumentet riktats på rätt sätt.

Om skanningen är korrekt, tryck på **KLAR**, och om du behöver sikta om eller skanna patienten igen, tryck på **X**.

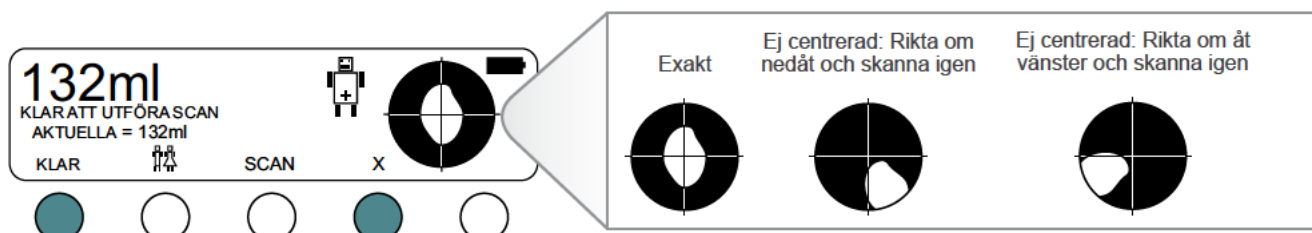

11. Bekräfta på Resultatskärmen att instrumentet riktats på rätt sätt.

Lägg efter behov till patient-ID, anteckningar eller tryck ut skanningsresultaten.

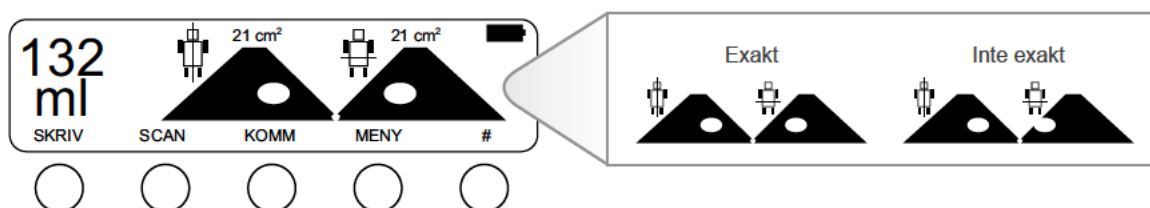

verathon.com