

Läs hela denna informationsbroschyr noggrant innan du använder Multi-Gyn LiquiGel och spara den för framtida läsning.

Multi-Gyn LiquiGel • Behandlar och lindrar vaginal torrhet

- Ger omedelbar lindring vid vaginal torrhet och stimulerar den naturliga fuktigheten
- Förebygger irritation och förbättrar den vaginala vävnaden
- Kompletterar och upprätthåller vaginalas naturliga fuktighet
- Produkten är naturlig, säker och skyddar den vaginala floran

Så här fungerar Multi-Gyn LiquiGel

Multi-Gyn LiquiGel lindrar omedelbart vaginal torrhet. Den optimerar den vaginala vävnadens tillstånd och stimulerar dess egna, naturliga fuktighet. Multi-Gyn LiquiGel bygger på det patenterade 2QR-komplexet. Denna naturliga substans kommer från växter och består av bioaktiva polysackarider. Den har den unika förmågan att neutralisera skadliga mikroorganismer på ett säkert och effektivt sätt. Produkten kan därför användas för att befärma den naturliga läkningsprocessen vid vävnadsskador i könsorganen. Multi-Gyn LiquiGel stimulerar den vaginala fuktigheten vilket hjälper till att lindra och skydda mot vaginal torrhet och irritation. Den hjälper kroppens egen fuktighetsbevarande process att uppnå en naturlig balans utan att påverka den vaginala floran. När den vaginala vävnaden återfuktas återställs dess naturliga elasticitet och funktioner. Multi-Gyn LiquiGel bildar en biologisk häftande film över slemhinnan för att säkerställa långvarig fuktighet och för att bibehålla en hälsosam vaginalflora. Den kompletterar och upprätthåller vaginalas naturliga fuktighet under samlag. Regelbunden applicering av LiquiGel minskar irritation och upprätthåller vaginalas optimala tillstånd. Sammansättningen är naturlig, säker och mild eftersom den inte baseras på giftiga substanser eller starka kemikalier och därför inte har några biverkningar.

Multi-Gyn LiquiGel är inte en hormonbehandling, men på grund av dess unika verkningsmekanism klassas den som en medicinteknisk produkt av klass IIa.

Indikationer

- vaginal torrhet under och efter klimakteriet
- vaginal torrhet orsakad av hormonella förändringar, läkemedel och stress
- vaginal torrhet under samlag
- vaginal atrofi, irritation och/eller obehag


Bruksanvisning

- **Vid vaginal torrhet** appliceras Multi-Gyn LiquiGel i riklig mängd minst en gång dagligen eller vid behov.
- **För förebyggande av vaginal torrhet och irritation relaterad till vaginal torrhet** appliceras Multi-Gyn LiquiGel i riklig mängd två gånger dagligen i minst 5 dagar.
- **För att stimulera vaginalas naturliga fuktighet** ska Multi-Gyn LiquiGel appliceras varje dag direkt före sänggående. Gelen ger inga fläckar på underkläder. Den är säker och mild och ger omedelbar lindring av vaginal torrhet, irritation och klåda.


Applicering

• Utvändig applicering


Vid torrhet i **yttre könsorgan** (vulva) kan Multi-Gyn LiquiGel appliceras med fingrarna (tvätta alltid händerna före och efter applicering av gel).

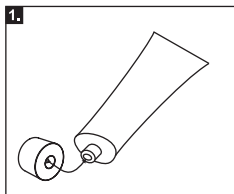


1. Ta av locket från tuben. Använd baksidan av locket för att sticka hål på förseglingen före första användningen.

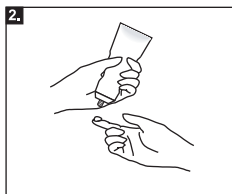

2. Håll tuben i ena handen och håll den andra handens pekfinger nära tuben som bilden visar. Kläm lätt på tuben. Fortsätt klämma tills du får en riklig mängd på pekfinger som bilden visar.

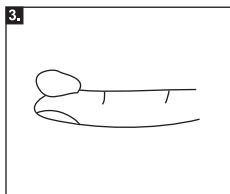

3. Mängden på pekfinger bör vara minst lika stor som en fingertopp (2 ml).

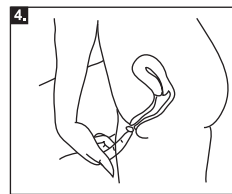

4. Applicera gelen på de yttre könsorganen.

Vänligen observera!

Multi-Gyn LiquiGel är en aktiv produkt som fuktar underlivet, förbättrar och stimulerar vävnadens naturliga fuktighet. Som en aktiv produkt kan Multi-Gyn LiquiGel orsaka en varm, stickande känsla efter applicering. Detta är helt normalt och försvinner efter några minuter.

Multi-Gyn LiquiGel bör inte användas längre än 30 dagar, för att den vaginala floran ska kunna reglera sig själv utan hjälp. Vid ihållande eller återkommande besvär ska du alltid kontakta läkare.

Ingredienser

LiquiGel innehåller mer än 25 % av 2QR-komplexet. Övriga komponenter är Vegetabiliskt Glycerin, det naturliga förtjockningsmedlet Xantangummi och den naturliga regulatorn av cellvätskor (osmoregulator) betain.

Den bioaktiva gelen kan variera lite i färg, från färglös till ljus brünstensfärgad. Detta beror på att den aktiva huvudingrediensen, 2QR-komplexet, är ett naturligt ämne och därför kan variera lite i färg. Detta påverkar inte produktens effekt eller säkerhet.

Multi-Gyn LiquiGel innehåller inga konserveringsmedel, hormoner, silikoner, ingredienser av animalisk ursprung, starka kemikalier eller dofter, och är helt ofarlig. Den är inte fet, ger inga fläckar och är vattenlöslig. Den ger ingen påverkan på tamponger eller kondomer.

Verksamma ämnen: Galaktoarabinan Polyglukuronsyra Korspolymer*, Glycerin, Betain, Xantangummi

*2QR-komplex: patenterade bioaktiva polysackarider. www.2QR.com

Allergier mot ingredienserna i Multi-Gyn LiquiGel är mycket sällsynta. Vid tveksamhet, applicera en liten mängd gel på insidan av underarmen. Om en klåda, röd fläck framträder avråder vi dig från att använda Multi-Gyn LiquiGel.

Biverkningar

Multi-Gyn LiquiGel har inga kända biverkningar och är en säker och naturlig sammansättning. Multi-Gyn LiquiGel är inte ett preventivmedel och innehåller inga spermiedödande medel. Inga studier har dock utförts på eventuell påverkan på spermernas aktivitet.

Läkemedelsinteraktioner

Multi-Gyn LiquiGel har inga läkemedelsinteraktioner.

Graviditet och amning

Det finns inga kända kontraindikationer för användning av Multi-Gyn LiquiGel under graviditet och amning.

Förvaring

Multi-Gyn LiquiGel bör förvaras vid 10–25°C (rumstemperatur).

Leverantör:

Nordic Consumer Health AB
Box 1183
131 27 Nacka Strand




Tillverkad av:
BioClin BV, Delftechpark 55,
2628 Xj, Delft,
Nederländerna




114
07818788
NC121.1

• Invändig applicering


För **invändig applicering** kan den särskilda applikatorn användas. Den finns bifogad i kartongen och kan skruvas fast på tuben. Efter användning kan du låta applikatorn sitta kvar på tuben, tvätta den med varmt vatten och sätt sedan på locket på applikatorn. Om du föredrar att använda fingrarna, tvättar du händerna och applicerar minst en fingertoppsstor mängd på pekfingrets topp. För in fingret i vagina.

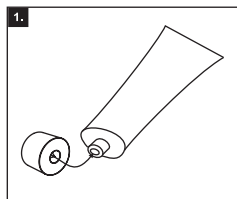


1. Ta av locket från tuben. Använd baksidan av locket för att sticka hål på förselningen före första användningen.

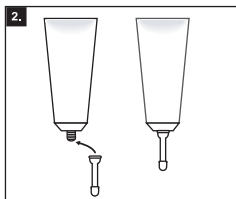


2. Skruva fast den särskilda applikatorn, som finns i kartongen, på tuben.

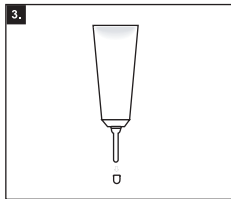


3. Ta av det lilla locket från applikatorn.

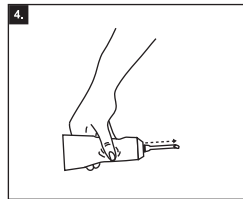


4. Håll tuben i ena handen och tryck lätt tills gel kommer ut från applikatorns spets. När gel kommer ut är applikatorn fylld med gel och klar att användas. Prova hur mycket som kommer ut med ett lätt tryck, du behöver en mängd som minst motsvarar en fingertopps storlek (2 ml).

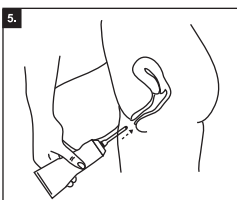


5. För in den monterade applikatorn i vaginan som bilden visar. Vaginan är 7–8 cm och motsvarar en normal kvinnas pekfinger. Längden på applikatorn är ungefär densamma som ett pekfinger och skadar inte livmoderhalsen.

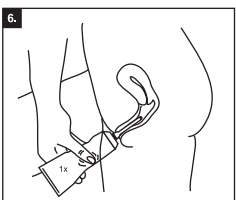

6. Kläm lätt på tuben. Du behöver en mängd som minst motsvarar en fingertopps storlek. Det finns dock ingen begränsning och det är ingen fara om du applicerar mer.

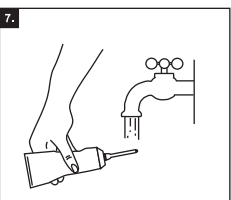

7. Efter användning kan du låta applikatorn sitta kvar på tuben och tvätta den med varmt vatten.

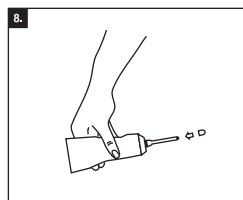

8. Sätt på det lilla locket på applikatorn.

Bakgrundsinformation:

Vaginal torrhet och obehag är vanligt förekommande

Vaginal torrhet och obehag drabbar mer än hälften av alla kvinnor, i alla åldrar och skeden i livet. Det är särskilt ett naturligt förekommande problem hos kvinnor under och efter klimakteriet på grund av de hormonella förändringarna. I normala fall hålls vaginas väggar smorda med ett tunt lager klar vätska. Under klimakteriet orsakar de sjunkande östrogennivåerna en minskning av mängden tillgänglig fukt. Det gör även vaginan tunnare och mindre elastisk.

Det är också det näst vanligaste besväret bland alla sexuellt aktiva kvinnor. Många kvinnor upptäcker den vaginala torrheten först när samlag blir obehagligt eller till och med smärtsamt. Det kan ge försämrat självförtroende, humör och påverka dagliga aktiviteter samt orsaka en allmän obehagskänsla.

Orsakerna till vaginal torrhet

Den vanligaste orsaken är en minskning av naturliga vaginala vätskor på grund av hormonella förändringar, t.ex. under menstruationscykelns andra hälft eller i samband med klimakteriet. Det finns dock även många andra faktorer som kan orsaka eller förvärra problemet, t.ex.: användning av hormonella preventivmedel eller vissa läkemedel, tvål, tamponger, stress, trötthet, graviditet och förlösning, samt samlag utan tillräcklig smörjning av naturliga vätskor eller utan en lämplig produkt, t.ex. LiquiGel.