

BVI 9400

SNABBGUIDE TILL BLÅSVOLYM

BladderScan®
Instrument för urinblåsevolym

1. Sätt på BVI 9400 genom att trycka ned strömknappen.

Om enheten är i viloläge kan vilken som helst knapp tryckas ned. Instrumentet slås på.



2. Välj undersökningsläge.



Välj för att skanna en patient som är mindre än 122 cm (48 tum) lång och väger mindre än 27 kg (60 pund).




Välj för att skanna en kvinnlig patient som inte har genomgått en hysterektomi.



Välj för att skanna alla andra typer av patienter.


3. Låt patienten ligga på rygg med magmusklerna avslappnade.

4. Placera rikligt med gel i medelinjen på patientens mage ungefär 3 cm (1 tum) ovanför blygdbenssymfysen.

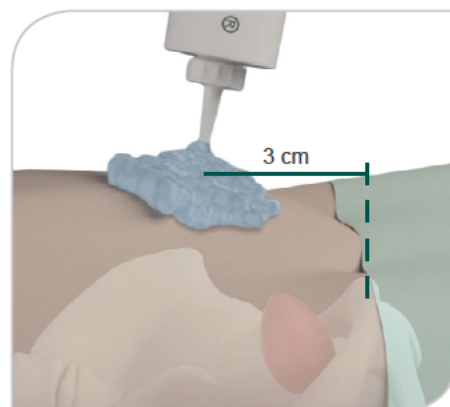

5. Stå på patientens högra sida. Sondens handtag ska peka mot dig.

6. Placera instrumentet på gelen på patientens mage och rikta instrumentet aningen nedåt mot patientens svansben.

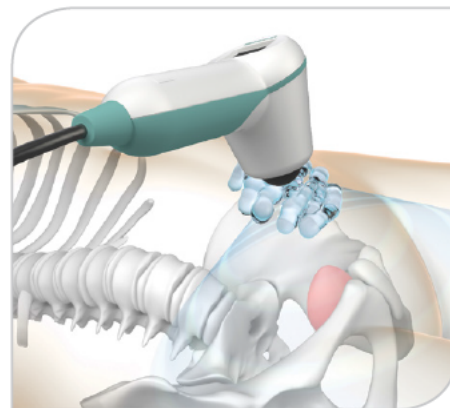


7. Tryck och släpp skanningsknappen.



8. Håll sonden stilla tills skanningen är klar.

När du hör tonen för avslutad skanning så är skanningen slutförd.

9. Verifiera på Resultatskärmen att instrumentet riktats på rätt sätt.

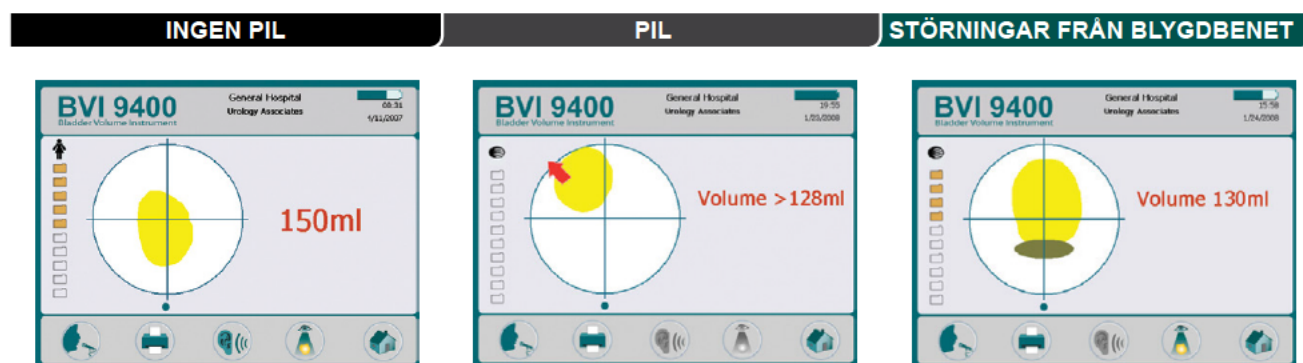

Om skanningen är lyckad visas urinblåsan i mitten av hårförsett på konsolen. Sonden visar åtta pilar på siktardisplayen.

Om skanningen misslyckas visar sonden en pil (fast eller blinkande) som anger riktning att flytta sonden för att komma på målet.

Blygdbenet är inuti bildkonen. Blygdbenet kan dölja en del av urinblåsan. Du bör sikta på nytt och skanna igen.

10. Om du vill spara en skanning, spela in en röstkommentar i enlighet med följande:

- På konsolen, tryck och släpp knappen **Spela in** .
- Håll mikrofonen ungefär 15 cm (6 tum) från munnen och tala tydligt.
- När du är klar med inspelningen trycker du på **Stopp**knappen .
- Tryck på knappen **Lyssna** . Röstkommentaren spelas upp.
- Om du inte är nöjd med inspelningen upprepar du inspelningsprocessen.

verathon.com



CE 0123

verathon.com
<https://my.scanpoint.com>

BladderScan, BladderScan-symbolen, Verathon och symbolen Verathon Torch är varumärken som tillhör Verathon Inc. © 2008, 2012, 2015 Verathon Inc. 0900-1446-SVSE-07-60



Huvudkontor:
Verathon Inc.
20001 North Creek Parkway
Bothell, WA 98011, USA
Tel: 800 331 2313 (endast USA och Kanada)
Tel: 425 867 1348 Fax: 425 883 2896

EC REP

Adress EG-representant
Verathon Medical (Europa) B.V.
Willem Fenengstraat 13
1096 BL Amsterdam, Nederländerna
Tel: +31 (0) 20 210 30 91
Fax: +31 (0) 20 210 30 92