

PeriAcryl®90 CE Cyanoacrylate

lim med hög viskositet för munnen

BRUKSANVISNING

BESKRIVNING

PeriAcryl®90-HV är ett cyanoakrylatlim i flytande form som består av en blandning av cyanoakrylaterna n-butyl och 2-octyl. PeriAcryl®90-HV kommer i en flaska förpackad i en folieficka tillsammans med 50 applikatorer för engångsbruk. PeriAcryl®90-HV är flytande tills den appliceras på målområdet. Vid kontakt med små mängder fukt på ytområden härdas PeriAcryl®90-HV snabbt och bildar en film som fäster på underliggande ytor.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

PeriAcryl®90-HV är avsedd för att fästa munplåster såsom COE-PAK™ på intakt tandkött och/eller tandemalj för att hålla plåstret på plats i upp till två veckor.

KONTRAIKATIONER

- I sällsynta fall kan materialet orsaka sensitivitet hos vissa personer. Om dylika reaktioner förekommer ska användningen av produkten avbrytas och läkare kontaktas.

PRODUKTFÖRBEREDELSE OCH UNDERHÅLL

- Öppna den skyddande påsen och avlägsna flaskan med PeriAcryl®90-HV. Släng påsen som vanligt kontorsavfall.
 - Obs! PeriAcryl®90-HV kommer som 5 ml i en 10 ml flaska för att förenkla användningen.
- Håll i flaskan och öppna den genom att vrida kapsylen motsols.
- Använd en av engångsapplikatorerna som medföljer; pressa samman pipettumpen samtidigt som du för in pipettens spets i flaskans öppning. Vippa långsamt flaskan så att PeriAcryl®90-HV kommer i kontakt med pipetten. Dekomprimera pipettumpen för att suga ut PeriAcryl®90-HV ur flaskan.
 - Obs! En återanvändbar bricka medföljer ifall du inte vill använda den ovan beskrivna utsugningmetoden. Tryck ut PeriAcryl®90-HV i en av fördjupningarna på brickan och sug upp med en av pipetterna.
- Materialet är nu redo att appliceras på ytan som behandlas. När applikationen är klar kasseras pipetten som vanligt kontorsavfall. Om du har använt brickan ska du avlägsna allt överflödigt PeriAcryl®90-HV från fördjupningen i brickan med hjälp av en torr pappershandduk.
- Innan du sätter på locket på flaskan igen ska du se till att flaskans kapsyl är ren och torr genom att avlägsna överflödigt lim med en pappershandduk eller gasväv. Se till att kapsylen sitter fast ordentligt och förvara PeriAcryl®90-HV upprätt i en temperatur på högst 5°C.

APPLIKATION

- När PeriAcryl®90-HV har sugits upp i pipetten och munplåstret sitter på plats:
 - Sätt på skyddsglasögon på patienten innan du applicerar PeriAcryl®90-HV.
 - Positionera pipettens spets direkt ovanför munförbandets kant.
 - Tryck försiktigt på pipettumpen. för att trycka ut en liten mängd PeriAcryl®90-HV längs kanten på munförbandet där det vidrör tandkötet eller tänderna.

- Obs! Var försiktig så att du inte trycker ut PeriAcryl®90-HV medan pipetten befinner sig ovanför patientens svalg. Om droppar av PeriAcryl®90-HV hamnar på patientens tunga eller tandköttsvävnad härdas de omedelbart men nöts bort efter hand. PeriAcryl®90-HV är oskadligt om det sväljs i dess polymerform. Patienten driver ut massan genom den vanliga avföringsprocessen.
- Jämna försiktigt ut det applicerade PeriAcryl®90-HV längs plåstrets kant och tandköttsvävnaden eller tandemaljen med pipettens spets.
- PeriAcryl®90-HV härdas på mindre än 30 sekunder.
- Slutför appliceringen längs munplåstrets kant. Om mer PeriAcryl®90-HV behövs än det som sugits upp ska du följa förberedelsestegen ovan med en ny pipett. Undvik korskontaminering genom att inte sätta tillbaka den använda pipetten i flaskan med PeriAcryl®90-HV.
- PeriAcryl®90-HV härdas snabbare när det appliceras i små mängder och sprids ut tunt för att öka ytexponeringen. Om härdningstiden fördröjs kan en ren bomullspinne användas för att sprida ut limmet tunnare och påskynda polymeriseringen.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

- PeriAcryl®90-HV-limmet fäster på nästan alla kroppsvävnader och många andra material som latexhandskar och rostfritt stål. Undvik kontakt med utrustning som inte är för engångsbruk eller som inte lätt kan rengöras med ett lösningsmedel som aceton. Använd inte dessa kemikalier för att avlägsna PeriAcryl®90-HV från oönskade platser inuti patientens mun.
- Om limmet i misstag kommer i kontakt med ett öga ska du inte försöka öppna ögat. Täck för ögat med ett mjukt förband och kontakta omedelbart en ögonläkare. Limmet förlorar sin fästförmåga efter några dagar och ögat öppnas av sig självt utan att ha skadats.
- PeriAcryl®90-HV fäster inte på ytor som smorts in med petrolatum. Undvik därför att använda substansen på områden där PeriAcryl®90-HV är avsett att fästa.
- PeriAcryl®90-HV absorberas inte och bör endast användas som ytmedel. Låt inte PeriAcryl®90-HV tränga in under ytvävnad.
- En liten mängd värme genereras under polymeriseringsprocessen. Den varar endast i några sekunder och orsakar inte något obehag för patienten.
- Produkten är endast avsedd för externt bruk.

FÖRVARING



PeriAcryl®90-HV bör förvaras kyld vid en temperatur på högst 5°C under längre perioder. Det skadar inte att förvara PeriAcryl®90-HV i frysen under 0°C. Kortare perioder i rumstemperatur (22°C) i högst fyra (4) veckor påverkar inte produktens prestationsförmåga negativt. Undvik långvarig exponering för höga temperaturer. Förvara på ett torrt ställe, borta från direkt värme och ljus. Använd inte efter utgångsdatumet som står på förpackningen.

Mer information om PeriAcryl®90-HV finns på webbplatsen

www.glustitch.com/periacryl

