

Vetericyn Antimikrobal Hydrogel bruksanvisning: SKAKA FLASKAN MED PUMPMEKANISMEN NEDTRYCKT före användning

Här är information och instruktioner om hur du håller hydrogelpumpflaskan funktionell.

Hydrogelens sammansättning är tjockare och långsammare i rörelse än vätskan, så den följer inte fysikens lagar på samma sätt som en vätskelösning. Ibland orsakar gelens sammansättning problem vid drift av pumparna. Sprutflaskmekanismen för Vetericyn produkter fungerar med sug. När pumpen pressas suger den gelén från flaskens botten in i sugröret och sprutar den ut genom spraymunstycket. I fallet med en gel, till skillnad från en vätska, kan det finnas ett tomt område vid sugpunkten och en luftbubbla bildas inuti gelén. Detta kan göra att pumpen stannar tillfälligt och börjar pumpa tomt. När flaskan skakas med pumpmekanismen nedtryckt återgår pumpen till driftstillstånd.

Problem med pumpmekanismen kan uppstå särskilt när flaskan används i ett snett läge. På grund av den lilla storleken på flaskan är sugslangen på Hydrogel sprayflaskan mycket kort och drar bara cirka 2-3 pumpar i volym. Det börjar pumpa tomt mycket snabbt om en luftbubbla har bildats i gelén. Problem kan också uppstå om produkten inte används regelbundet. Om gelén får torka kan detta försämra pumpens funktionalitet. När flaskan börjar tömmas är hydrogelen, liksom vätskan, inte en slät vätskeyta vid botten av flaskan från vilken sugmekanismen kan dra in den i sugröret. Gelén kan vara kvar på flaskans kanter, utom räckhåll för röret, även om flaskan skakas. Detta problem uttalas särskilt när flaskan inte har skakats vid varje användning.

Hydrogelens sammansättning är oslagbar vid sårläggning och t.ex. vid behandling av allergiska hudsymtom

Vetericyn Antimicrobial Hydrogel är specifikt utformad för sårläggning för att hålla den känsliga vävnaden fuktig och ren från patogener. Bredspektrum effektivitet i kombination med den vävnadsvänliga, icke-irriterande kompositionen är en oslagbar kombination både förebyggande och vid behandling av hudinfektioner. Produkten har också en kylande effekt och anti-inflammatoriska egenskaper, vilket gör den särskilt väl lämpad för stöd av allergiska hudsymtom.

Vetericyn Antimikrobal Hydrogel -produkten bruksanvisning

- Skaka flaskan med pumpmekanismen nedtryckt före varje användning!
- Om möjligt håll flaskan upprätt när den används
- Om pumpen börjar pumpa tomt, skaka flaskan igen med pumpen nedtryckt
- Om du använder flaskan i vinkel, skaka den försiktigt var 3-5: e pump
- Rengör pumpmunstycket efter användning för att förhindra att gelén torkar ut och blockerar spraymunstycket

Om pumpen slutar fungera trots dessa instruktioner kan sugröret ha blivit tilltäppt med gel (särskilt om produkten inte har använts på länge). Gör då följande:

- 1) Öppna flaskan och ta bort pumplocket
- 2) Placera pumpens sugledning i kokt kyllt vatten
- 3) Pumpa vatten genom pumpmekanismen i cirka 10-15 tryck
- 4) Sätt tillbaka den rengjorda pumpen i hydrogelflaskan så tätt som möjligt
- 5) Om gelén är låg i flaskan och den verkar för fast, kan du droppa lite kokt vatten eller Vetericyn Wound & Skin spray i flaskan för att mjukgöra gelén



Vetericyn[®] ANIMAL WELLNESS