

# SV BRUKSANVISNING

Produktkod: ELITE-TIM | Rullstol i aluminium

## RULLSTOLENS DELAR



1. Handtag
2. Ledsagarbroms
3. Mekanism för hopfällning av ryggstöd
4. Armstöd
5. Justeringsklämma för armstöd
6. Parkeringsbroms (handbroms)
7. 8" svängbart framhjul
8. Snabbkopplingsmekanism
9. Skyddsrem för vader
10. Fotstöd
11. Fotstödsarm
12. Sits med säkerhetsbälte
13. Ryggstöd
14. Tippskyddshjul
15. Justering av tyngdpunkt
16. 24" massivt bakhjul med drivring
17. Ficka för föremål
18. Käpphållare

## 1. Egenskaper

Rullstolen är tillverkad av en lätt aluminiumram. Den har uppfällbara och justerbara armstöd. Den är utrustad med snabbkopplingsfunktion, justering av tyngdpunkt (fram och bak), ledsagarbromsar och ett hopfällbart ryggstöd. Den är utrustad med skyddsremmar för vader och säkerhetsbälte, tippskyddshjul med längdjustering, massiva 24" bakhjul och 8" svängbara framhjul. Dessutom gör den andningsbara nätklädseln det möjligt för användaren att fälla ihop rullstolen utan att ta bort den från ramen.

**Setet innehåller:** rullstolsram med hjul, klädsel med ficka för föremål, fotstöd med skyddsremmar, tippskyddshjul, käpphållare, nyckelsats för montering/demontering.

## 2. Användning

Rullstolen är avsedd för personer som har svårt att förflytta sig på egen hand samt för patienter med funktionsnedsättning eller begränsad rörlighet. Denna självgående rullstol kan även manövreras av en medföljande person. Rullstolen är lämplig för både inomhus- och utomhusbruk.

## 3. Montering

### Steg 1: Fälla upp rullstolen

Placera rullstolen på golvet. Fäll upp rullstolen genom att använda armstöden. Tryck sedan ner sidorna av sitsen så att alla delar låses på plats.

### Steg 2: Ryggstöd och sits

Lyft ryggstödet uppåt och lås det med ryggstödslåsen som sitter under handtagen (3). Fäst klädseln med väska på rullstolen.

### Steg 3: Fotstöd

Fäst fotstödet på utsidan av ramen. Vrid sedan in fotstödet tills det låses.

### Steg 4: Armstöd

Armstöden är uppfällbara. För att höja armstödet, tryck på knappen som sitter på ramen (5).

### Steg 5: Justera höjden på fotstöd och armstöd

- Justera fotstöden med hjälp av medföljande monteringsnycklar. Skruva loss skruven på fotstödsramen. Det ska finnas tillräckligt med utrymme mellan fotplattorna och golvet – fotplattor som är för lågt inställda kan göra det svårt att ta sig upp för backar eller trottoarkanter. Ställ in fotplattorna så att vinkeln mellan överkropp och lår är 90° (optimal sittposition).
- För att justera armstöden, dra i justerspaken och välj önskad höjd. Båda armstöden bör vara i samma höjd.

### Steg 6. Montering av skyddsremmar och käpphållare

Fäst skyddsremmarna på fotstöden för att förhindra att användarens ben glider av fotplattorna. Montera kähphållaren på den föredragna sidan av rullstolen.

## **FÄLLA IHOP RULLSTOLEN OCH RYGGSTÖDET**

Rullstolen kan fällas ihop för att enklare transporteras och förvaras.

- Sväng fotplattorna uppåt till vertikalt läge eller ta bort dem. Ta bort sits- och ryggklädseln med väska. Lyft sitsen uppåt framifrån och bakifrån tills ramen fälls ihop.
- För att fälla ryggstödet, tryck samtidigt på låsanordningarna under handtagen på baksidan av ryggstödet och dra ryggstödet nedåt.

## **PARKERINGSBROMS**

För att låsa hjulen, tryck bromsspaken framåt tills hjulet är helt blockerat (separat för vänster och höger hjul). Observera: Parkeringsbromsen används enbart för att låsa hjulen när rullstolen står helt stilla.

## **LEDSAGARBROMSAR**

Bromshandtagen är placerade bakom ryggstödet, under båda handtagen.

- För att bromsa rullstolen, tryck in bromshandtaget. Släpp handtaget för att lossa bromsen. Utför detta mjukt och med lagom kraft.
- Bromsarna är utrustade med parkeringslås. För att aktivera dem, tryck in den övre bromsspak tills du hör ett "klick". För att släppa parkeringsläget, tryck in den undre bromsspak.

## **JUSTERING AV PARKERINGSBROMSAR**

Parkeringsbromsens effektivitet beror på dess justering och placering. Bromshandtaget ska vara inställt så att bromsbacken trycker stadigt mot hjulet utan överdrivet motstånd.

- Om motståndet är för högt, dra handtaget något framåt genom att lossa låsskruvarna på parkeringsbromsen. Justera bromsbacken så att den låser hjulet lätt utan att det blir för trögt.
- Om bromsbacken inte vidrör hjulet tillräckligt, följ samma instruktion men flytta handtaget i motsatt riktning.

## **4. Innan användning**

### **Steg 1: Kontrollera rullstolens skick**

Kontrollera bromsarna, konstruktionen och däcken. Se till att alla komponenter är korrekt monterade och justerade.

**Observera:** Använd inte rullstolen om du upptäcker några fel eller skador.

### **Steg 2: Använda parkeringsbromsen**

Lås hjulen när du kliver i eller ur rullstolen.

### Steg 3: Fotplattor

Fotplattorna ska vara i vertikalt läge vid i- och urstigning. Använd inte fotplattorna som stöd – det finns risk för fall. När användaren har satt sig, fäll ner fotplattorna.

**Observera:** Stå inte på fotplattorna – det kan orsaka skador.

### Steg 4: Sätta sig i rullstolen

Placera rullstolen så nära användaren som möjligt. Den ska stå mot sängen eller stolen som används. Om användaren inte kan sätta sig själv, hjälp till med överföringen.

### Steg 5: Användarens position

Användaren ska sitta upprätt med knäna böjda i 90° vinkel.

**Rullstolen är nu klar att använda.**

## 5. Teknisk information

<b>Sitsmått:</b> 44/46/49 x 43 cm	<b>Sitsens höjd från golvet:</b> 49 cm
<b>Total bredd:</b> 61/63/66 cm	<b>Armstödet höjd från sitsen:</b> 23-29 cm
<b>Total djup:</b> 110cm	<b>Mått i hopfällt läge:</b> 83 x 26 x 77 cm
<b>Total höjd:</b> 95 cm	<b>Vikt:</b> 11,60-12,00 kg
<b>Maximal belastning:</b> 120 kg	

## 6. Anmärkningar

**Timago International Group ansvarar inte för felaktig användning av rullstolen, bristande efterlevnad av säkerhetsföreskrifter eller missbruk av produkten.**

## 7. Rengöring och underhåll

Utför regelbundet underhåll av rullstolens delar:

- Klädsel och dyna kan rengöras med en fuktig (inte blöt) trasa och kallt eller varmt vatten, utan rengöringsmedel. Svåra fläckar kan tas bort med en svamp. Blöt inte ner klädseln för mycket. Torka bort från värmekällor.
- Plastdelar kan rengöras med en fuktig trasa och vid behov med lämpliga rengöringsmedel för plast. Följ alltid säkerhetsanvisningarna från tillverkaren.

## 8. Förvaring och transport

Produkten får inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 9. Garantivillkor










Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av garanti. Villkoren finns i garantikortet på vår webbplats. Vänligen kontakta återförsäljaren där du köpte

produkten. Observera: Spara kvitto eller faktura som inköpsbevis för garantiärenden.

## 10. Händelser med medicintekniska produkter

Alla allvarliga händelser som involverar en medicinteknisk produkt ska rapporteras till tillverkaren och till den behöriga myndigheten i den medlemsstat i Europeiska unionen där användaren eller patienten är bosatt.

## 11. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	Partinummer		UDI-kod
	Serienummer		Medicinteknisk produkt
	Obs!		Vänligen läs instruktionen
	Produkten uppfyller Europeiska unionens lagstadgade krav för medicintekniska produkter (MDR 2017/745).		

Vårt kompletta sortiment finns tillgängligt via våra distributörer. Läs mer på: [www.timago.com](http://www.timago.com). Tack för att du valt Timago!