

SVENSKA

Mobilex A/S — Bruksanvisning | Avantgarde + Serval Rollator | Art. 312801, 312802, 312803, 312804

1. Inledning

Du har valt en högkvalitativ Mobilex-produkt och det gläder oss särskilt. Den här bruksanvisningen innehåller en beskrivning och viktig information om användningen av medicinteknisk utrustning. Den är avsedd att hjälpa dig att använda produkten korrekt och säkert. Det är mycket viktigt att du läser manualen noggrant innan du använder produkten. Var särskilt uppmärksam på säkerhetsriktlinjerna och följ dem alltid. Mobilex strävar ständigt efter att förbättra och uppdatera sina produkter. Därför förbehåller vi oss rätten att ändra specifikationer och tekniska data för produkten utan ytterligare förvarning.

Avsedd användning

Den här produkten är en medicinteknisk produkt utformad för att öka rörligheten hos personer som har svårigheter med att stå eller gå. Rollatorn gör det möjligt för dessa personer att återfå förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Rollatorn lämpar sig för personer som behöver ett stabilt gånghjälpmedel på grund av olika sjukdomar. Rollatorn bör endast användas som stöd vid stående och gående. Rollatorns säte kan användas för att sitta och vila. All annan användning är förbjuden.

Indikationer

Rollatorn är ett medicinskt hjälpmedel som hjälper människor med funktionsnedsättning. Indikationerna för användning är sjukdomar som leder till rörelsebegränsningar och funktionshinder som hindrar självständigt stående och gående. Därför krävs extra stabilt stöd vid utförande av dessa aktiviteter. Indikationerna kan inte kopplas till en specifik klinisk bild och beror på den individuella bedömningen av den potentiella användarens hälsotillstånd av en läkare eller sjukgymnast. De primära målgrupperna är dock äldre personer, personer med pareser, reumatiska sjukdomar och andra personer med begränsad rörlighet i ländrygg, knän eller höfter. Användning av produkten för annat syfte än det som beskrivs ovan är förbjuden.

Kontraindikationer

Rollatorer är inte lämpliga för personer som inte kan hålla balansen i stående ställning. Produkten får inte användas om användaren har problem med perception. Kontraindikationer kan inte kopplas till en specifik klinisk bild och beror på den individuella bedömningen av den potentiella användarens hälsotillstånd. Valet av lämpligt ortopediskt hjälpmedel för en specifik klinisk bild måste alltid göras med hjälp av en specialistläkare eller sjukgymnast. Observera dessutom säkerhetsinstruktionerna i kapitel 2.

Användningsområden

Produkten lämpar sig för inomhus- och utomhusbruk och kan användas av privatpersoner i hemmiljö, vid hemvård, vid hälso- och omsorgsinrättningar och på sjukhus.

Medicinska incidenter och oönskade händelser

Om oönskade händelser uppstår i samband med produkten, vänligen kontakta återförsäljaren eller tillverkaren:

Mobilex A/S, Grønlandsvej 5, DK-8660 Skanderborg, Denmark

Tel: +45 87 93 22 20 | Fax: +45 87 93 17 77 | Email: info@mobilex.dk

2. Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning har lästs av alla personer som använder produkten. Tillverkaren tar inget ansvar för skador och/eller personskador orsakade av att bruksanvisningen inte har följts.

- Använd produkten endast i felfritt skick.
- Om defekter eller fel upptäcks måste du omedelbart ta produkten ur drift och kontakta återförsäljaren.
- Följ alla rekommendationer och varningar från tillverkaren.
- Beakta informationen på produktens etikett.
- Använd produkten endast för det beskrivna ändamålet.
- Klättra inte på produkten.
- Gör inga konstruktiva ändringar på produkten om du inte har skriftlig tillåtelse från tillverkaren för sådana modifieringar.
- Produkten och väskan får inte belastas med mer vikt än vad som anges i de tekniska data.
- Alla hjul MÅSTE ALLTID stå på golvet under användning. Detta säkerställer att rollatorn är korrekt balanserad och minskar risken för olyckor.

- Var försiktig när du monterar eller justerar delar av enheten.
- Kontrollera alltid att hjulbromsarna fungerar ordentligt innan användning.
- Använd bara rollatorn när den är helt utfälld och låsanordningen är aktiverad.
- Sätet får bara användas när parkeringsbromsarna är aktiverade.
- Båda bromsarna bör alltid aktiveras eller låsas samtidigt.
- Det är inte tillåtet att transportera en person eller ett föremål på sätet medan rollatorn är i rörelse.
- Parkeringsbromsarna måste alltid vara aktiverade när rollatorn inte är i bruk.

Leverans

Produkten levereras i en kartong. Förpackningens innehåll är:

- 1 rollator hopfälld inkl. monterat säte, ryggrem och shoppingväska
- 1 bruksanvisning

Preliminär kontroll

Kontrollera förpackningens innehåll mot listan ovan. Om du i detta skede märker att en del saknas eller är skadad, kontakta omedelbart din leverantör.

3. Beskrivning

Produktbeskrivning

Avantgarde/Serval Rollatorn har 4 hjul och en pulverlackerad kolramme. Tack vare den lätta ramen kan den enkelt fällas ihop och erbjuder enkel förvaring och transport. Rollatorn går lätt och är tillräckligt stabil. Skjuthandtagen kan justeras i höjd. Rollatorn levereras med ett monterat säte, en ryggrem och en shoppingväska.

Rollatorn består av följande delar:

1. Skjuthandtag (Material: PP+TPR)
2. Bromsspak (Material: PP)
3. Sätetsrör (Material: Alu.)
4. Knapp för höjdjustering av handtag (Material: PP)
5. Broms (Material: PP)
6. Bakhjul (Material: PP+TPR)
7. Tippedal (Material: Kol)
8. Ryggrem (Material: Tyg)
9. Klämma för hopfällningsspärr (Material: PP)
10. Säte med rem för hopfällning (Material: Tyg)
11. Shoppingväska (Material: Tyg)
12. Svängbart framhjul (Material: PP+TPR)
13. Reflektorer

Monteringsbeskrivning

Ingen monteringsanvisning krävs för denna produkt.

Funktionsbeskrivning

Hopfällning/Utfällning av ramen (Bild 2 - 5)

För att fälla ut ramen låser du upp hopfällningsspärrklämmans och trycker ned sätetsrören tills ramen fälls ut och «klickar», vilket indikerar att rollatorn är låst i utfällt läge. För att fälla ihop ramen drar du i hopfällningsremmen uppåt och avslutar hopfällningen genom att skjuta sätetsrören mot varandra och låsa dem ihop med hopfällningsspärrklämmans.

⚠ Sätetsrören måste låsa fast på båda sidor när rollatorn fälls ut. Alla delar måste vara säkert låsta innan rollatorn kan användas. Underlåtenhet att följa dessa varningar kan leda till personskada.

Höjdjustering av skjuthandtag

För att justera höjden på armstöden trycker du på höjdjusteringsstiften och flyttar armstödet ett steg. Upprepa proceduren tills önskad inställning är nådd och upprepa proceduren för det andra handtaget.

NOTE: Båda handtagen ska alltid vara på samma höjd. Den korrekta höjden på skjuthandtagen ska alltid vara i handledens höjd för användaren när de står med armarna längs sidan av kroppen.

Bromsar

Bromsarna kan aktiveras gradvis genom att dra bromsspakarna uppåt med ökande kraft. Bromsarna är fullt aktiverade när bromsspakarna nuddar handtagen och rollatorn har stannat helt. För att avsluta bromsprocessen släpper du bromsspakarna. Rollatorn är också utrustad med en parkeringsbromserfunktion. För att aktivera parkeringsbromsarna trycker du ner bromsspaken tills den låser sig i detta läge. För att lossa parkeringsbromsarna drar du bromsspakarna tillbaka till neutralläget.

⚠ Aktivera alltid parkeringsbromsen när du inte använder rollatorn! Om du parkerar rollatorn på en ojämn yta måste du alltid aktivera parkeringsbromsen!

⚠ Bromsarna måste alltid vara låsta när rollatorn är parkerad! Använd aldrig sätet när bromsarna inte är låsta! Luta dig aldrig bakåt när du sitter. Det rekommenderas att sitta bara på den främre delen av sätet. Sitt inte på väskan.

Tippepedal

Tippepedalen gör det lättare för användaren att övervinna små hinder genom att tippa rollatorn bakåt. Tippepedalen är integrerad i ramen.

Reflektorer

Rollatorn är utrustad med reflektorer på skjuthandtagen och på framsidan av rören för väskan.

Tillbehör

Det finns inga tillbehör till denna utrustning.

4. Tekniska data

Parameter	Art. 312801 / 312803	Art. 312802 / 312804
Skjuthandtag höjjusterbart	70 – 87 cm	76 – 99 cm
Rekommenderas för användarhöjd	140 – 187 cm	150 – 195 cm
Säteshöjd	55 cm	62 cm
Packstorlek hopfälld (H x B x D)	81,5 x 22 x 65 cm	84 x 22 x 65 cm
Total bredd öppen	63 cm	63 cm
Längd öppen / hopfälld	63 / 22 cm	63 / 22 cm
Vikt (rollator / väska)	5,5 / 0,6 kg	5,5 / 0,6 kg
Max. bärkapacitet (rollator / väska)	150 kg / 5 kg	150 kg / 5 kg
Bromsar	2 låsbara med parkeringsfunktion	2 låsbara med parkeringsfunktion
Hjulstorlekar (fram och bak)	200 x 36 mm – PA+TBE	200 x 36 mm – PA+TBE
Vändradie	80,8 cm	80,8 cm
Material	Kolram, aluminiumkors, plast	Kolram, aluminiumkors, plast

Produktetikett (Bild 6)

Produktetiketten är placerad på ett av de nedre rören på huvudramen och innehåller viktig information: namn, serienummer, produktionsdatum, artikelnummer, maximal användarvikt, maximal belastning av väskan, produktbredd samt tillverkardata. Etiketten får aldrig tas bort från enheten.

5. Underhåll och rengöring

Normal smuts kan avlägsnas med kommersiellt tillgängliga rengöringsmedel och en svamp eller mjuk trasa. Kontrollera den specifika produktinformationen och använd endast kommersiellt tillgängliga rengöringsprodukter som är lämpliga för rengöring. För desinfektion används endast desinfektionsmedel som är certifierade för användning med medicintekniska produkter och finns tillgängliga lokalt.

Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mild rengöringsmedel. Efter rengöring bör hjullagren regelbundet smörjas med olja, samt när hjulen börjar gnissla.

Trots den solida konstruktionen och användningen av motståndskraftiga material utsätts produkten för slitage. Det rekommenderas därför att låta produkten kontrolleras med jämna mellanrum av en professionell serviceinstans. Vi rekommenderar följande:

- Rengöring och desinfektion av produkten
- Kontroll av ramen för böjningar, skador, slitage eller korrosion
- Kontroll av slitdelar och eventuellt utbyte
- Allmän efterdragning av komponenter

Rekommenderad användningstid: Normalt 10 år, beroende på användning.

Förvaring: Vi rekommenderar förvaring på en torr plats vid temperaturer över 0 °C.

Transport

Det rekommenderas att fälla ihop produkten för transport. Produkten bör transporteras stabiliserad och säkrad så att inga plötsliga eller farliga rörelser kan inträffa under transport.

Återanvändning

Produkten är lämplig för återanvändning. Innan en ny användare tar över produkten måste produkten tekniskt kontrolleras och desinfekteras enligt punkt 5.

6. Vanligaste problem och lösningar

Problem	Möjliga orsaker	Lösning
Rollatorn är svår att styra eller skjuta	Smuts mellan hjul och gafflar	Ta bort smuts eller hår mellan hjul och gafflar
Bromsarna fungerar inte eller bara på ena sidan	Bromsbeläggen är slitna, eller bromsarna är inte korrekt justerade	Justera bromsarna. Byt ut bromsbeläggen vid behov (→ servicecenter).
Sätet passar inte in i ramen när du fäller ut rollatorn	Låset är i fel position eller är defekt	Kontrollera om låset är korrekt justerat. Byt ut det vid behov (→ servicecenter).

7. Kassering av produkten

Produkten kan inte kastas med hushållsavfall och måste lämnas till det lokala återvinningscentret.

8. Garantivillkor

Mobilex A/S erbjuder 2 års garanti för skador orsakade av tillverknings- eller materialfel. Garantin gäller inte vid ej ändamålsenlig reparation eller användning av produkten. Delar som är föremål för normalt slitage täcks inte av garantin om inte slitaget beror på ett tillverkningsfel. Om produktändringar görs utan vårt skriftliga medgivande är CE-märkningen och produktgarantin inte längre giltig. Vid produktskador som täcks av denna garanti, vänligen kontakta din återförsäljare eller Mobilex A/S direkt. Garantin täcker inte transportkostnader och inkluderar inte ersättning för personskada eller utebliven användning av produkten under reparation. Garantin täcker inte skador orsakade av underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

9. CE-försäkringen om överensstämmelse



Produkten har klarat bedömningen av överensstämmelse enligt EU-förordning MDR 2017/745 om medicintekniska produkter och är CE-märkt. En försäkringen om överensstämmelse har utfärdats för produkten, som du kan hämta via följande länk eller via QR-koden på produktetiketten:

https://mobilex.dk/medias/ce_avantgarde_serval_312801_04.pdf