

# BRUKSANVISNING

## Bariatric toalettstol

Produktkod: MAXIMUS




### 1. Egenskaper

Den bariatriskas toalettstolen är gjord av pulverlackerad stålram. Den har höjddjusterbara ben med antiglidande gummispetsar. Stolen är utrustad med toaletsits och toaletthink i plast som är lätta att montera. Den kan anpassas till patientens behov tack vare dess höjddjustering. Armstöd ger stabilitet och säkerhet.

**I setet ingår:** huvudram med sidarmstöd och antiglidspetsar, ryggstödsrör, framrör, toilettsits och hink med lock.

### Element i toalettstolen:

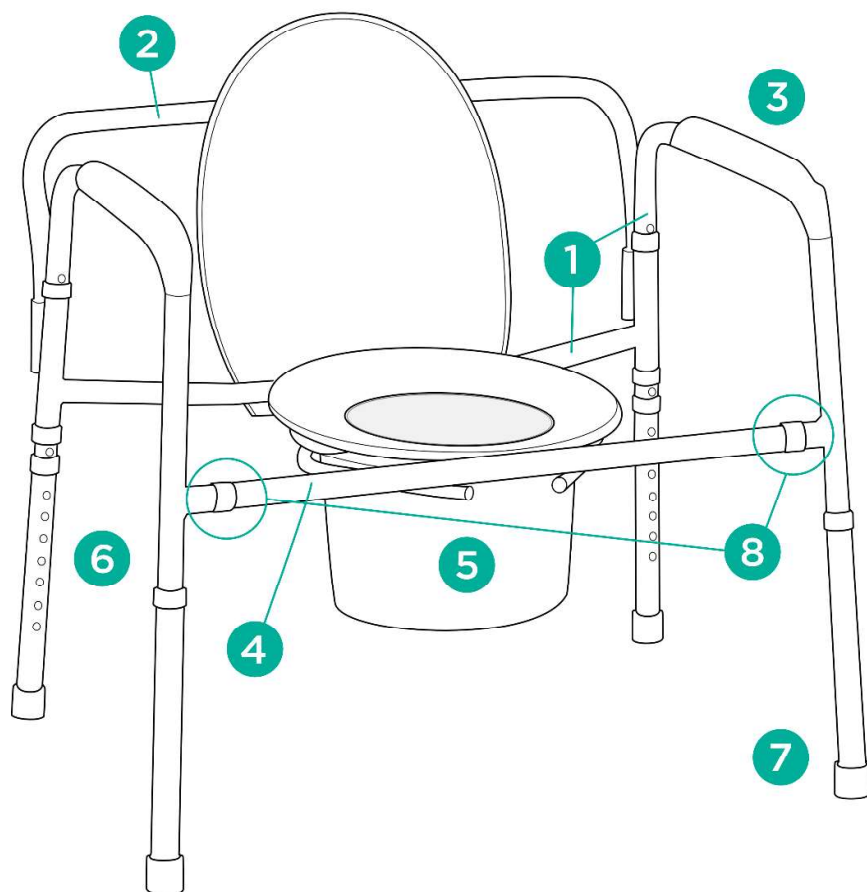

1. huvudram med sidodelar
2. ryggstödsrör
3. armstöd
4. främre röret
5. toaletthink
6. höjddjustering
7. antiglidspets
8. anslutningspunkter

### 2. Ansökan

**Kommodstolen** är en hjälputrustning som hjälper användaren att utföra hygieniska aktiviteter. Stolen rekommenderas till personer med funktionssvårigheter och nedsatt rörlighet som har problem med att gå utan hjälp

och till de som tappat förmågan att självständigt sitta och resa sig. Stolen fungerar som toalett tack vare toaletthinken som sitter under sitsen. Stolen underlättar att utföra fysiologiska aktiviteter och ta hand om användaren.

### 3. Montering

#### Utfällning och vikning

**Steg 1.** Vik ut sidodelar av ramen. Se till att monteringsöppningarna för ryggstödsröret är på baksidan.

**Steg 2.** Fäst det främre röret i monteringsöppningar (anslutningspunkter) placerade på framsidan av sidodelarna. Använd låsstift för att säkra dem.

**Steg 3.** Fäst ryggstödsröret i öppningarna på baksidan av ramen.

**Steg 4.** Montera toaletsitsen på den nedre skenan av huvudramen tills plastgreppen klickar.

**Steg 5.** Lyft upp sitsen och montera toaletthinken.

#### Höjdjustering

- För att justera höjden på stolen, tryck på metallstiftet, välj lämplig höjd på benet och lås sedan benens läge i förhållande till varandra med låsstiftet. Benen är justerbara i steg om 2,5 cm.

**Notera!** Stiften måste ställas på samma nivå i varje ben. Benen ska alltid stå stabilt på golvet.

### 4. Tekniska data

Total bredd	77 cm
Inre bredd	67 cm
Totalt djup	54 cm
Sitthöjd från marken	42,5-58 cm
Totalhöjd från marken	66-81,5 cm
Sitsens mått	42 x 35 cm
Stolens vikt	9,1 kg
Maximal kapacitet	294 kg
Ramfärg	grå

## 5. Anmärkingar

Timago International Group tar inte ansvar för felaktig användning av toalettstolen, underlåtenhet att följa säkerhetsföreskrifter och felaktig användning.

## 6. Underhåll

Utför regelbundet underhåll av stolens tekniska skick:

- Rengör toalettstolen regelbundet med endast vatten och milda rengöringsmedel. Torka ordentligt.
- Använd inte för rengöring: starka poler- och rengöringsmedel, slipmedel, blekmedel, bensin eller lösningsmedel (det kan orsaka ramskador, synliga defekter och följaktligen - förlust av garantirättigheter).
- Töm och desinficera toalettstolen och toalettsitsen efter varje användning. Använd toalettrensmedel enligt tillverkarens anvisningar.










## 7. Förvarings- och transportförhållanden

Enheten bör inte utsättas för direkt solljus, vatten eller fukt.

## 8. Garantiinformation

Alla produkter som distribueras av vårt företag omfattas av en garanti, vars villkor beskrivs i garantikortet som finns på vår webbplats. Kontakta återförsäljaren där du köpte produkten. Tänk på att för garantiändamål bör inköpsbeviset (kvitto eller faktura) behållas.

## 9. Etiketter

	Referensnummer		Tillverkare
	LOT -nummer		Tillverkning datum
	Serienummer		Medicinsk apparat
	Notera		Behåll och läs instruktionen
	Tillverkaren kontrollerade överensstämmelse med väsentliga medicinska utrustningskrav.		