


Montering av Pioneer Hoof Care Protection



Med bootsen kommer ett verktyg, Pull Tool, för att lätt kunna dra remmarna över knoppskruvarna. Bootsens kommer med alla remmar fastsatta.

Bootsen har tre remmar - den övre som fäster högst upp på trakt-hållaren, den mittersta, ankarremmen som fästes i själva skalet, och den nedre remmen som fäster på nedre delen av trakt-hållaren

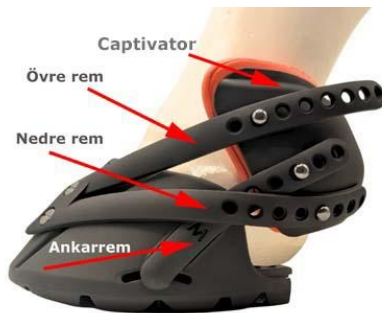

Lösgör först alla remmar utom den inre **ankarremmen**.

Se till att hela hovens vikt bärande yta vilar inuti på bootsens sula. Placera trakt-hållaren i mitten av trakten/ballarna.

Fäst ankarremmen på utsidan av skalet och över mellersta knoppskruven på trakt-hållaren. Knäpp i samma hålposition på båda sidor.



Fäst den långa **nedre remmen** över den nedre knoppskruven på trakt-hållaren. Placera trakt-hållaren i rätt position, en bit högre upp. Knäpp i samma hålposition på båda sidor.



Placera den **övre remmen** på trakt-hållarens övre knoppskruv. Kolla av att trakt-hållaren sitter tätt mot ballarna. Men att du kan få mellan ett finger mot benet. Dra åt de långa remmarna om nödvändigt. Ankarremmen är flexibel och designad för att kunna töjas, för optimal passform av trakt-hållaren. Knäpp i samma hålposition på båda sidor.