


Floatingboot Instruktioner

Innan du sätter på bootsen måste du vika ner bakstycket (fig.2) och sätt sedan i hoven i bootsen (fig.3).


När hoven är i booten, vrid den åt vänster och höger flera gånger tills justeringen är klar (fig. 4).

fig.2

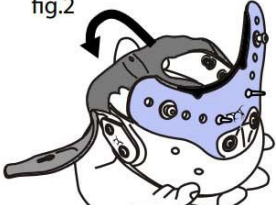

För att uppnå bästa resultat bootsens form vara väl anpassad till hästens hov. Efter några användningar blir det lättare eftersom den kontinuerligt formar sig efter hoven

3

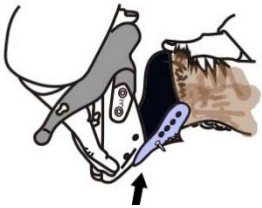

Bakstycket bör varken vara för hårt eller för löst. Du kan prova olika möjliga positioner tills du får det bästa läget. Använd insexnyckeln och flytta pivoten efter behov till ett av lägena, hålen i frontplattan.

När rätt position har valts kan du applicera lite lim på pivoten om du vill.

1,4



Hoven ska ligga an mot bootsens innervägg för bästa passform.

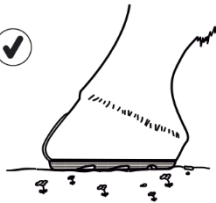


fig.8

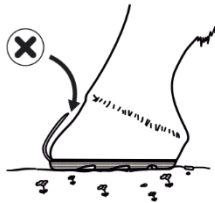


fig.9

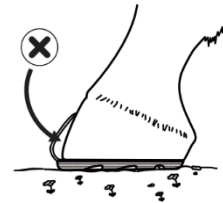


fig.10

För att ta av booten korrekt måste du dra remmarna framåt, inte bakåt eller utåt (fig 7).

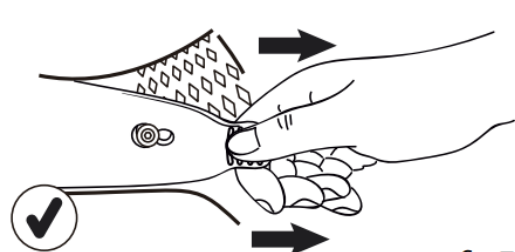


fig.7