

Drogtest PGB Panel - Urin

Detta CE godkända snabbtest är avsett för kvalitativ detektion av pregabalin (PGB) i urin, som ofta syftar på ett läkemedel som säljs under varumärket Lyrica. Testet är avsett som ett preliminärt screeningverktyg.





Specifikation

Substans	Förkortning	Gränsvärde (ng/mL)	Ungefärlig detektionstid i urin
Pregabalin	PGB	500	Upp till 1-2 dygn efter intag. Vid hög konsumtion 3-5 dygn efter intag.

Utförande

1. Samla urinprovet i en ren, torr behållare.
2. Testet, urinprovet och eventuella kontroller ska vara i rumstemperatur (15–30°C).
3. Öppna testförpackningen strax före användning.
4. Doppa teststickan vertikalt i urinprovet i 10–15 sekunder. Gå inte över markeringen (MAX).
5. Placera testet på en plan, icke-absorberande yta.
6. Läs av resultatet efter 5 minuter (inte efter 10 minuter).

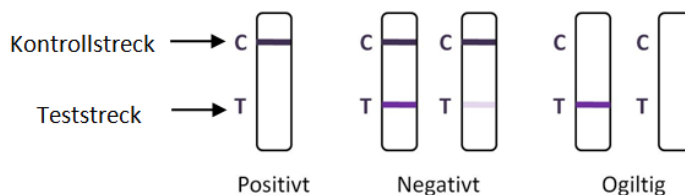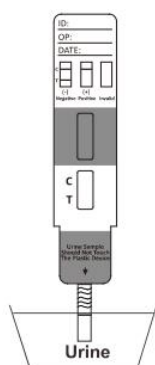

Tolkning av resultatet

- **Negativt:** Två linjer visas – en vid kontrollinjen (C) och en vid testlinjen (T).
- **Positivt:** Endast en linje visas vid kontrollinjen (C); ingen linje vid testlinjen (T).
- **Ogiltigt:** Ingen linje vid kontrollinjen (C); testet måste göras om.

Korsreaktivitet - Falskt positiva resultat

Vissa receptbelagda och receptfria läkemedel kan orsaka falskt positiva resultat på drogtester. Exempelvis:

Testad drog	Möjliga orsaker till falskt positivt resultat
PGB (Lyrica)	Gabapentin – liknande struktur, men mycket sällsynt

Vid misstänkt falskt positivt resultat rekommenderas bekräftande laboratorieanalys.

Tillförlitlighet (jämfört med GC/MS)

	GC/MS Positiva	GC/MS Negativa	Totalt
Test Positivt	29	0	29
Test Negativt	0	110	110
Totalt	29	110	139

Totalt överensstämmelse: >99 %

Gränsvärdesvariation (± 25 %)

Gränsvärdesvariation inom ± 25 % uppfylls enligt internationell standard.

Begränsningar

- Falska positiva/negativa kan förekomma p.g.a. felaktig hantering eller andra ämnen i urinen.

Förvaring och hållbarhet

1. Förvaras vid 2°C -30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
2. Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
3. När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
4. Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
5. Använd ej efter passerat utgångsdatum.

Symbolindex

	Bruksanvisning		Tester per kit		Auktoriserad representant
	Endast för in vitro diagnostisk användning		Använd före		Återanvänd ej
	Förvara mellan 2-30 °C		Lot nummer		Katalog #
	Använd inte om varan är skadad		Tillverkare		

 **Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.**
 #550, Yinhai Street
 Hangzhou Economic & Technological Development Area
 Hangzhou, 310018 P.R. China
 Web: www.alltests.com.cn Email: info@alltests.com.cn



 **EC REP**
 MedNet EC-REP GmbH
 Borkstrasse 10,
 48163 Muenster,
 Germany