


LESEN UND BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN!

Die Nichteinhalten der vollständigen Anweisungen beeinträchtigt die Wirksamkeit des Produkts. Das Produkt enthält farbiges (orange, blau oder rot) und weißes Silikon, die gemäß den folgenden Anweisungen gemischt werden müssen, um die Ohrstöpsel richtig zu formen. Bitte lesen Sie die Anleitung vor der Durchführung des Verfahrens, um sich mit dem gesamten Prozess vertraut zu machen.

1. Reinigen Sie Ihre Ohren und waschen Sie Ihre Hände gründlich. Schmutz und Ablagerungen beeinträchtigen die Aushärtungsgeschwindigkeit dieses Produkts. Halten Sie einen Spiegel bereit, bevor Sie beginnen.
2. Entnehmen Sie das Material vorsichtig aus jedem Behälter und teilen Sie es in zwei gleiche Teile. Lagern Sie die verbleibenden Hälften in ihren jeweiligen Behältern (Abbildung 1). Halten Sie das farbige und das weiße Material getrennt, da die Vermischung den Aushärtungsprozess in Gang setzt.
3. Um den Aushärtungsprozess zu starten, mischen Sie die farbigen und weißen Materialien 15-30 Sekunden lang kräftig oder bis sie schlierenfrei sind (Abbildung 2). Zu einer Kugel rollen (Abbildung 3). **Fahren Sie sofort mit Schritt vier fort.**
4. Halten Sie Ihren Kopf flach und schieben Sie die Kugel vorsichtig in ein Ohr, indem Sie auf die Mitte des Materials drücken. Falten Sie das überschüssige Material ein und drücken Sie erneut mehrmals auf die Mitte (Abbildung 4). Das Material passt sich dann der Kontur des Ohrs an und bildet eine gute Abdichtung. Füllen Sie die Ohrmuschel so vollständig und glatt wie möglich aus. Ein Spiegel ist sehr hilfreich, um ein glattes Äußeres und eine gute Optik zu erhalten. Überschüssiges Material, das nicht zum Ausfüllen der Ohrmuschel benötigt wird, kann vor dem vollständigen Aushärten entfernt und weggeworfen werden. **DRÜCKEN SIE DAS MATERIAL NICHT ZU TIEF IN DEN GEHÖRGANG.** WÄHREND DES VORGANGS NICHT KAUEN ODER SPRECHEN. Sobald ein gleichmäßiger Ohrstöpsel geformt ist, lassen Sie ihn mindestens 10 Minuten im Ohr aushärten. Wenn der geformte Stöpsel noch weich ist, kann die Aushärtung länger dauern.

- ENTFERNEN SIE DEN STÖPSEL MINDESTENS 10 MINUTEN LANG NICHT AUS DEM OHR. Wenn der Stöpsel vollständig ausgehärtet ist, entfernen Sie ihn langsam durch Drehen und Drücken auf die Rückseite des Ohrs. Es wird empfohlen, den Ohrstöpsel weitere drei Stunden aushärten zu lassen, bevor er im Aufbewahrungsbeutel gelagert wird.
5. Ein richtig konstruierter Gehörschutzstöpsel hat eine glatte Außenfläche, die eng am Ohr anliegt und teilweise in den Gehörgang hineinragt (Abbildung 5).
 6. Wiederholen Sie die obigen Schritte mit dem restlichen farbigen und weißen Material für das andere Ohr.

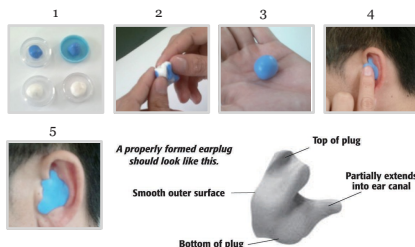

-VERWENDUNG EINES GEFORMTEN OHRSTÖPSELS UND WICHTIGE INFORMATIONEN

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Stöpsel nach oben ziehen, während Sie ihn in Ihr Ohr drücken, damit die Luft aus dem Gehörgang entweichen kann. Der Ohrstöpsel "stabilisiert" sich, wenn er sich auf Körpertemperatur erwärmt. Verwenden Sie den Stöpsel nur nach Anweisung. Verwenden Sie keine Latexhandschuhe. Bei Kindern ist die Aufsicht eines Erwachsenen erforderlich. Lesen und befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig. Nehmen Sie den Stöpsel mindestens 10 Minuten lang nicht aus dem Ohr, während er sich im Ohr festsetzt. Das geformte Material muss vollständig aushärten, bevor es aus dem Ohr entfernt wird. Drücken Sie das Material nicht mit Gewalt in den Gehörgang. Unsachgemäßer Gebrauch oder Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Verletzungen führen. Der Hersteller haftet nicht für unsachgemäßen Gebrauch. Das Material darf nicht verschluckt werden.

MINDESTSCHALLDÄMMUNG

SNR=19dB H=22dB M=16dB L=15dB

Schalldämpfung

Frequenz [Hz]	Schalldämpfung [dB]	Standardabweichung [dB]	VPA [dB]
63	21.7	6.2	15.5
125	18.8	5.3	13.4
250	19.6	5.1	14.5
500	16.6	4	12.6
1000	19.7	4.8	14.9
2000	29.2	4.2	25
4000	35.2	7.1	28.2
8000	28.9	8.7	20.2

Prüflabor: Michael & Associates, Inc

Anschrift: State College 2766W College Ave Suite 1, State College, PA 16801, USA

Prüfungstermin: 18/7/2023 - 25/8/2023

Die Konformitätserklärung ist abrufbar unter: www.comfortearplug.com

CemateX AB

Vikagälgatan 23, 21618 Limhamn, SCHWEDEN

CE 2834

EN 352-2: 2020 (EU) 2016/425

Zertifizierung Benannte Stelle:

C C Q S Certification Services Limited

Block 1 Blanchardstown Corporate Park,

Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15

D15 AKK1, Dublin, Irland