


Brugsanvisning – DANSK

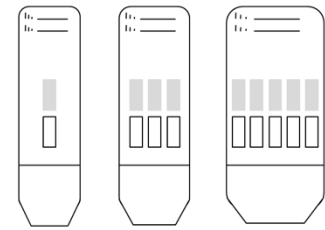

Narkotikatest - Urin - Panel (multi)

På bagsiden af emballagen står der, hvilke forkortelser dit narkotikatest tester for. En hurtig engangstest til påvisning af narkotika og narkotikametabolitter i urin.

Indhold


- Testpanel

Materiale nødvendigt for at udføre testen

- Opsamlingsbeholder
- Timer
- Testpanel

Fremgangsmåde

1. Tag testen ud af folieposen.
2. Fjern beskyttelseshætten for at eksponere absorptionsdelen (ikke gældende for strimmel).
3. Opsaml urin i en ren og tør beholder og dyp straks testen lodret ned i urinen. Lad den stå i urinen i ca. 10–15 sekunder. OBS! Urinen må ikke komme over "pil-markeringen" på testen.
4. Tag testen op og læg den på en plan og tør overflade. Start timeren og aflæs resultatet inden for 5 minutter. OBS! Aflæs ikke resultatet efter 10 minutter.

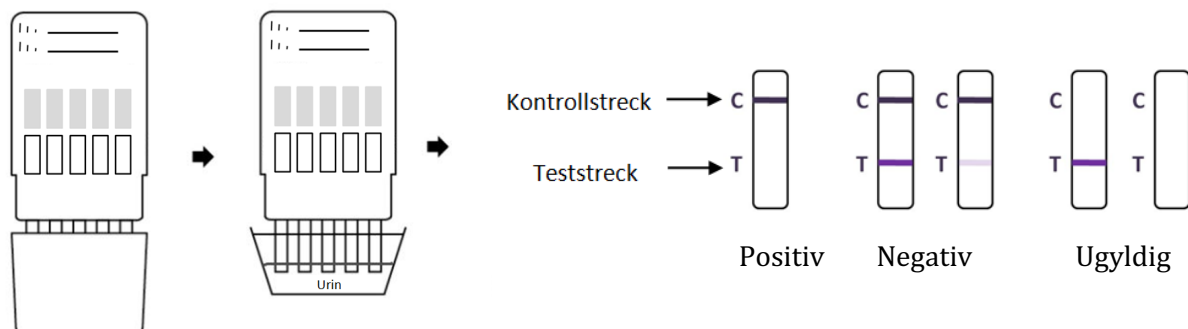

Fortolkning af resultat

POSITIV: En rød linje fremkommer i kontrolområdet (C). Ingen linje fremkommer i testområdet (T). Dette positive resultat indikerer, at narkotikakonzentrationen er over detektionsniveauet.

NEGATIV:* To linjer fremkommer. En rød linje skal være i kontrolområdet (C), og en tydelig rød eller lyserød linje skal være i testområdet (T). Dette negative resultat indikerer, at narkotikakonzentrationen er under detektionsniveauet.

Brugsanvisning – DANSK

*BEMÆRK: Nuancen af rød farve i testområdet (T) kan variere, men testen bør betragtes som negativ, selv ved en svag lyserød linje.

UGYLDIG: Kontrolinjen fremkommer ikke. Utilstrækkelig prøvemængde eller forkert udførelse er de mest sandsynlige årsager. Gennemgå proceduren og gentag testen med en ny teststrimmel. Hvis problemet fortsætter, afbryd proceduren og kontakt din lokale leverandør.

Opbevaring og holdbarhed

- Opbevares ved 2°C – 30°C i forsejlet pose indtil udløbsdato.
- Må ikke fryses. Beskyttes mod direkte sollys, fugt og varme.
- Når folieposen er åbnet, skal testen bruges straks. Langvarig udsættelse for fugt reducerer produktets pålidelighed.
- Åbn ikke foliepakken før du er klar til at udføre testen.
- Brug ikke efter udløbsdatoen.

Detektionstider

Stof	Forkortelse	Cut-off (ng/ml)	Omtrentlig detektionstid*
Cannabis	THC	200	10-15 dage
Cannabis	THC	50	15-30 dage
Cannabis	THC	20	15-40 dage
Kokain	COC	300	2-4 dage
Metamfetamin	MET	1000	2-5 dage
Metamfetamin	MET	500	2-5 dage
Buprenorfin	BUP	10	3-6 dage
Oxycodon	OXY	100	2-4 dage
Opiater	OPI	2000	2-4 dage
Metadon	MTD	300	10-14 dage
Tramadol	TML	100	3-4 dage
Benzodiazepiner	BZO	300	3-7 dage
Amfetamin	AMP	1000	2-4 dage
MDMA (Ecstasy)	MDMA	500	2-5 dage
Ketamin	KET	1000	2-3 dage
Propoxyphen	PPX	300	1-2 dage
Fentanyl	FYL	200	1-3 dage
Fentanyl	FYL	10	1-3 dage
Ethylglucuronid	ETG	300	3-5 dage
Pregabalin	PGB	500	2-4 dage
Gabapentin	GAB	2000	1-3 dage
Zopiclon	ZOP	50	1-2 dage
Clonazepam	CLO	150	5-7 dage
Morfin	MOP	300	2-4 dage
LSD	LSD	10	1-3 dage

* Alle detektionstider er omtrentlige, da udskilleleshastigheden varierer individuelt. Ved Cannabis kan detektionstiden variere betydeligt afhængigt af misbrug.