


Benutzeranweisungen

Test auf bakterielle Vaginose (Vaginose) - 6-Kombi-Set

1. Nehmen Sie eine vaginale Probe, indem Sie den Tupfer sanft gegen die Scheidenwand drehen, etwas weiter in die Vagina hinein.
2. Berühren Sie die pH-Mulde 2–3 Mal mit dem Tupfer. Lesen Sie das Ergebnis ab.
3. Platzieren Sie den Tupfer im Probenröhrchen und fügen Sie 12–14 Tropfen der "BV Extraction Solution" hinzu. Rühren Sie mit dem Tupfer um und drücken Sie ihn von außen gegen das Röhrchen, damit das Sekret vom Tupfer freigesetzt und in die Lösung gemischt wird.
4. Verwenden Sie die Pipette und geben Sie 2 Tropfen der Probenlösung in jede Mulde (außer pH).
5. Fügen Sie einen Tropfen "Chromogenic Reagent" in die H_2O_2 -Mulde hinzu.
6. Lassen Sie die Reaktion im Ofen bei 42–45 °C für 5 Minuten ablaufen. Lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 15 Minuten ab.

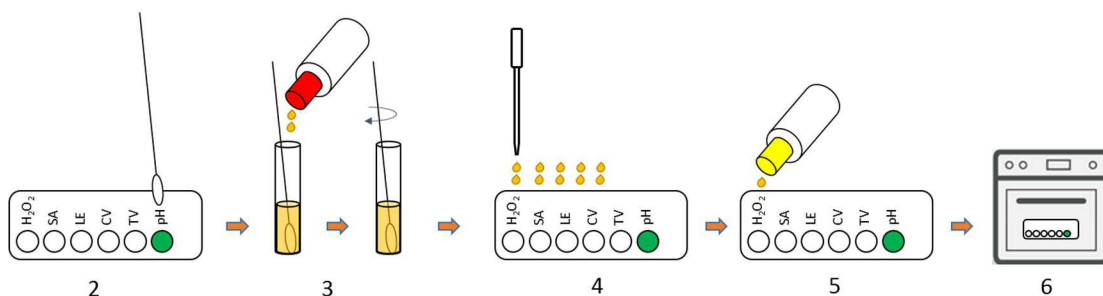

Ergebnis

pH Abnormal: [Blau] [Dunkelblau] Normal: [Gelb] [Grün]	H₂O₂ Abnormal: [Orange] [Weiß] Normal: [Pink] [Pink]	SA Positiv: [Blau] [Hellblau] [Grün] Negativ: [Weiß] [Gelb]	LE Positiv: [Blau] [Hellblau] [Grün] Negativ: [Weiß] [Gelb]
CV Positiv: [Gelb] [Gelb] Negativ: [Weiß]	TV Positiv: [Gelb] [Gelb] Negativ: [Weiß]		

pH - Ein abnormer Wert weist auf eine Infektion hin.

H₂O₂ - Ein abnormes Ergebnis weist auf eine Infektion hin.

SA - Ein positives Ergebnis weist auf bakterielle Vaginose hin.

LE - Ein positives Ergebnis weist auf eine vaginale Entzündung hin.

CV - Ein positives Ergebnis weist auf eine Pilzinfektion hin.

TV - Ein positives Ergebnis weist auf eine Trichomoniasis-Infektion hin.

Analytische Empfindlichkeit

H₂O₂: ≥2 μmol/L

SA: ≥7 units/ml

LE: ≥9 units/ml

CV: ≥1x1000 cfu/ml

TV: ≥1x1000 cfu/ml