


Drogentest

Einzelpanel & Multipanel

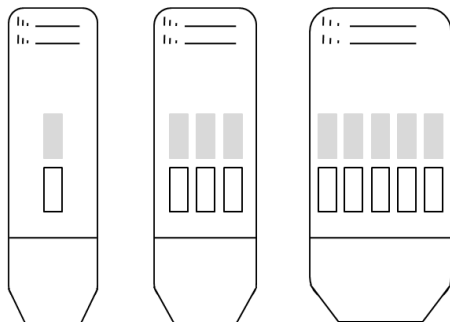

Wie funktioniert der Test?

Die Abkürzung, auf die Ihr Drogentest testet, steht auf der Rückseite der Packung. Ein schneller Ein-Schritt-Test für den Nachweis mehrerer Drogen und Drogenmetaboliten im Urin.

Substanz	Abkürzung	Cut-off	Ungefähre Erkennungszeit*
Cannabis	(THC)	200 ng/ml	10-15 Tage
Cannabis	(THC)	50 ng/ml	15-30 Tage
Cannabis	(THC)	20 ng/ml	15-40 Tage
Kokain	(COC)	300 ng/ml	2-4 Tage
Methamphetamin	(MET)	1000 ng/ml	3-5 Tage
Buprenorphin	(BUP)	10 ng/ml	3-6 Tage
Oxycodon	(OXY)	100 ng/ml	2-4 Tage
Opiate	(OPI)	2000 ng/ml	2-4 Tage
Methadon	(MTD)	300 ng/ml	10-14 Tage
Tramadol	(TML)	100 ng/ml	3-4 Tage
Benzodiazepine	(BZO)	300 ng/ml	3-7 Tage
Amphetamin	(MPA)	1000 ng/ml	2-4 Tage
Methylendioxymethamphetamin (Ecstasy)	(MDMA)	500 ng/ml	1-3 Tage
Ketamin	(KET)	1000 ng/ml	2-3 Tage
Propoxyphen	(PPX)	300 ng/ml	1-2 Tage
Fentanyl	(FYL)	200 ng/ml	1-3 Tage

** Alle Nachweiszeiten sind relativ, da die Geschwindigkeit, mit der der Körper Substanzen ausscheidet, individuell ist. Bei Cannabis kann die Nachweiszeit je nach Abhängigkeit der Person stark variieren*

Inhalt


- Testkassette

Für die Durchführung des Tests benötigte Materialien

- Behälter für die Probenahme
- Zeitschaltuhr
- Testkassette

Ausführung

1. Nehmen Sie die Testplatte aus dem Folienbeutel.
2. Ziehen Sie die Schutzhülle ab, um das Ansaugteil freizulegen.
3. Fangen Sie den Urin in einem sauberen, trockenen Behälter auf und tauchen Sie die Testkassette direkt und senkrecht hinein. Etwa 10-15 Sekunden im Urin belassen. **HINWEIS!** Achten Sie darauf, dass der Urin nicht über die "Pfeil"-Markierung auf der Testkassette läuft.
4. Nehmen Sie die Testkassette aus dem Urin und legen Sie sie auf eine ebene, trockene Fläche. Starten Sie den Timer und lesen Sie das Ergebnis innerhalb von 5 Minuten ab. **HINWEIS!** Lesen Sie das Ergebnis nicht nach 10 Minuten ab.

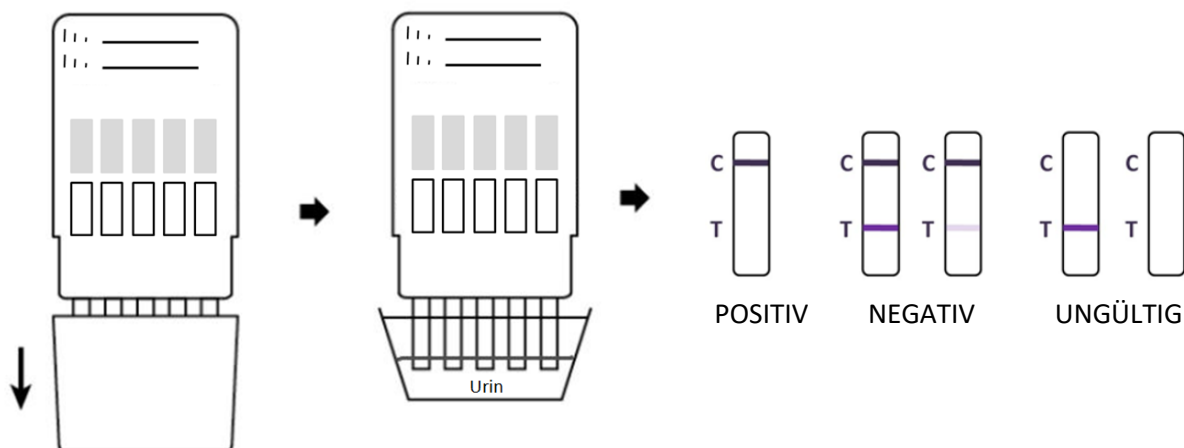

Interpretation des Ergebnisses:

POSITIV: In der Kontrollregion (C) erscheint eine rote Linie, in der Testregion (T) erscheint keine Linie. Dieses positive Ergebnis zeigt an, dass die Drogenkonzentration über dem nachweisbaren Wert liegt.

NEGATIV: Es erscheinen zwei Linien. Eine rote Linie sollte sich in der Kontrollregion (C) befinden, und eine deutlich sichtbare rote oder rosa Linie sollte sich in der Testregion (T) befinden.

Dieses negative Ergebnis zeigt an, dass die Medikamentenkonzentration unter dem nachweisbaren Wert liegt.

HINWEIS: Der Farbton der roten Linie im Testbereich (T) kann variieren, aber der Test sollte als negativ angesehen werden, wenn auch nur eine schwache rosa Linie sichtbar ist.

UNGÜLTIG: Die Kontrolllinie erscheint nicht. Unzureichendes Probenvolumen oder eine fehlerhafte Durchführung sind die wahrscheinlichsten Gründe für das Ausbleiben der Kontrolllinie.

Überprüfen Sie das Verfahren und wiederholen Sie den Test mit einem neuen Teststreifen. Wenn das Problem weiterhin besteht, brechen Sie den Vorgang ab und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Lieferanten.

Lagerung und Haltbarkeitsdauer

1. Bei 2°C - 30°C in einem verschlossenen Beutel bis zum Verfallsdatum aufbewahren.
2. Nicht einfrieren. Vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit und Hitze geschützt lagern.
3. Sobald der Folienbeutel geöffnet ist, sollte der Test sofort verwendet werden. Längerer Kontakt mit Feuchtigkeit verringert die Zuverlässigkeit des Produkts.
4. Öffnen Sie die Folienverpackung erst, wenn Sie bereit sind, den Test durchzuführen.
5. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr verwenden.