

COC (Spyt) – Hurtigttest for Kokain

Hvad testen gør

Testen er en hurtigttest til kvalitativ påvisning af kokain og dets metabolitter i spyt med en følsomhedsgrænse på 20 ng/mL. Resultatet fås inden for 3–10 minutter.

Indhold

- Teststick (engangsbrug)
- Instruktion
- Kræver kun spyt – intet blod eller urin

Sådan udfører du testen

1. Forberedelse:


- Spis eller drik ikke noget i mindst 10 minutter før testen.

2. Prøveindsamling:

- Fjern låget på testen.
- Sæt svampenden i munden.
- Gnid aktivt langs tandkødet på begge sider (10–15 gange).
- Placer derefter svampen under tungen, indtil der ses væske i testvinduet (~60 sek).
- Tag testen ud og start timeren.

3. Aflæsning:

- Aflæs resultatet efter 3–10 minutter.
- Aflæs ikke efter 20 minutter.

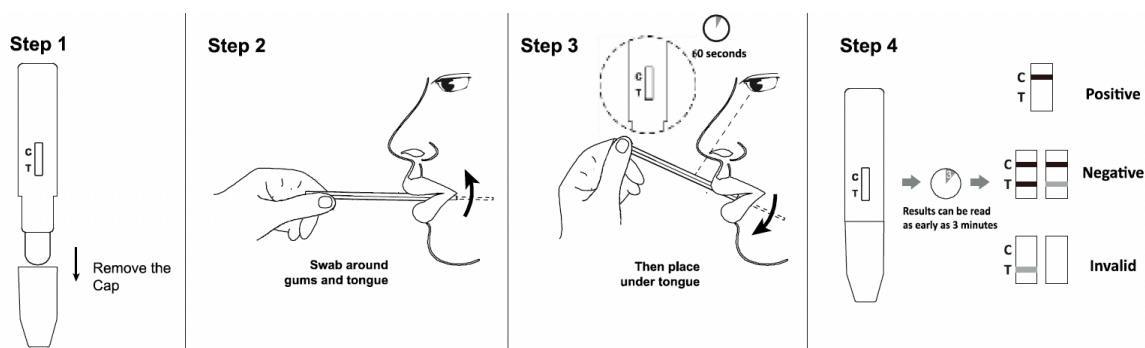

Fortolkning af resultat

- Negativt: To linjer ses (C og T). Kokain er ikke påvist eller under grænseværdien (20 ng/mL).
- Positivt: Kun kontrolinjen (C) ses. Kokain er påvist over grænseværdien.
- Ugyldigt: Ingen kontrolinje (C) = testen er ugyldig. Gentag med en ny test.

Bemærk: Farvens styrke på T-linjen kan variere – alle nuancer tælles som negativt.

Hvor længe efter brug kan kokain påvises?

- Kokain og dets metabolitter kan påvises i spyt op til ca. 24–48 timer efter brug.
- Detektionsvinduet påvirkes af dosis, brugerens stofskifte og om brugen er enkeltstående eller regelmæssig.

Nøjagtighed

- Total overensstemmelse: 93,8 % sammenlignet med referencemetode (GC/MS)
- Analytisk følsomhed: Pålidelig positiv ved ≥ 20 ng/mL
- Ingen krydsreaktioner med almindelig medicin eller kosttilskud

Vigtig info

- Kun til engangsbrug
- Opbevares tørt ved stuetemperatur (2–30 °C)