

COC (Sylki) – Kokaiinin pikatesti

Mitä testi tekee

Tämä on pikatesti kokaiinin ja sen aineenvaihduntatuotteiden kvalitatiiviseen havaitsemiseen syljestä, herkkyysraja 20 ng/mL. Tulokset saadaan 3–10 minuutissa.

Sisältö

- Testitikku (kertakäyttöinen)
- Ohjeet
- Vaatii vain sylkeä – ei verta tai virtsaa

Testin suorittaminen

1. Valmistelu:


- Älä syö tai juo mitään vähintään 10 minuuttiin ennen testiä.

2. Näytteenotto:

- Poista testitikun korkki.
- Aseta sieni suuhun.
- Hiero aktiivisesti ikeniä molemmilta puolilta (10–15 kertaa).
- Aseta sieni sitten kielen alle, kunnes nestettä näkyy testin ikkunassa (~60 sekuntia).
- Poista testi ja käynnistä ajastin.

3. Tulos

- Lue tulos 3–10 minuutin kuluttua.
- Älä lue tulosta 20 minuutin jälkeen.

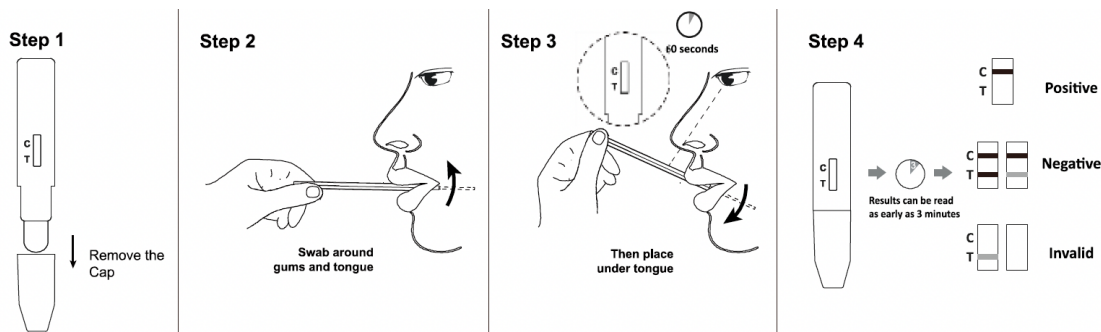

Tulosten tulkinta

- Negatiivinen: Näkyvissä kaksi viivaa (C ja T). Kokaiinia ei ole havaittu tai pitoisuus on alle 20 ng/mL.
- Positiivinen: Vain kontrolliviiva (C) näkyy. Kokaiini on havaittu yli 20 ng/mL pitoisuudella.
- Virheellinen: Kontrolliviivaa (C) ei näy = testi on virheellinen. Toista uudella testillä.

Huom: T-viivan värin voimakkuus voi vaihdella – kaikki sävyt lasketaan negatiiviseksi.

Kuinka pitkään käytön jälkeen kokaiini näkyy?

- Kokaiini ja sen aineenvaihduntatuotteet voidaan havaita syljestä noin 24–48 tuntia käytön jälkeen.
- Havaitsemisaikaan vaikuttavat annos, käyttäjän aineenvaihdunta ja käyttötiheys.

Tarkkuus

- Kokonaisvastaavuus: 93,8 % verrattuna referenssimenetelmään (GC/MS)
- Analyttinen herkkyys: luotettava positiivinen ≥ 20 ng/mL
- Ei ristireaktioita tavallisten lääkkeiden tai lisäravinteiden kanssa

Tärkeää tietoa

- Vain kertakäyttöön
- Säilytä kuivassa huoneenlämmössä (2–30 °C)