

COC (Saliv) – Snabbtest för Kokain

Vad testet gör


Testet är ett snabbtest för att kvalitativt detektera kokain och dess metaboliter i saliv med en känslighetsgräns på 20 ng/mL. Resultatet fås inom 3–10 minuter.

Innehåll

- Teststicka (engångsbruk)
- Instruktion
- Kräver endast saliv – inget blod, ingen urin

Så gör du testet

1. Förberedelse: - Ät eller drick inte något på minst 10 minuter före testet.
2. Insamling:
 - Ta av testets lock.
 - Sätt in svampändan i munnen.
 - Gnugga aktivt längs tandkötet på båda sidor (10–15 gånger).
 - Placera sedan svampen under tungan tills vätska syns i testfönstret (~60 sek).
 - Ta ut testet och starta timer.
3. Avläsning:
 - Läs resultatet efter 3–10 minuter.
 - Tolka inte efter 20 minuter.

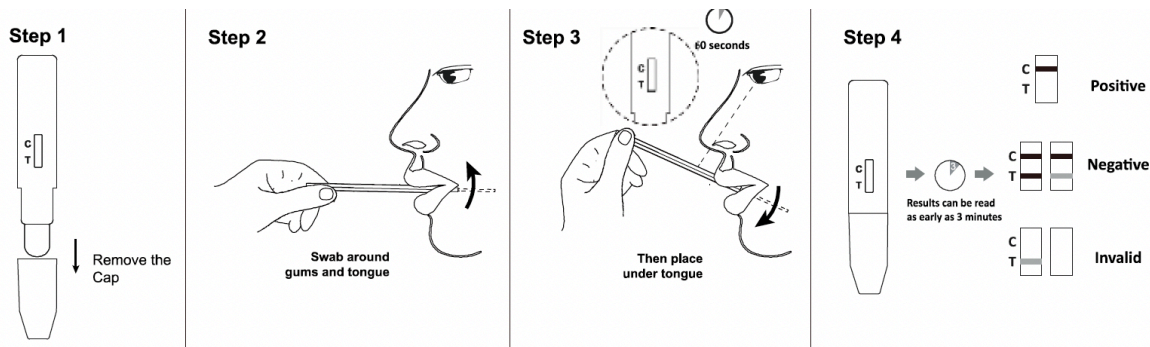

Tolkning av resultat

- Negativt: Två linjer syns (C och T). Kokain finns ej eller under gränsvärde (20 ng/mL).
 - Positivt: Endast kontrollinje (C) syns. Kokain har detekterats över gränsvärdet.
 - Ogiltigt: Ingen kontrollinje (C) = testet ogiltigt. Gör om med ett nytt test.
- Obs: Färgens styrka på T-linjen kan variera – alla nyanser räknas som negativt.*

Hur länge efter bruk syns kokain?

- Kokain och dess metaboliter kan detekteras i saliv upp till cirka 24–48 timmar efter användning.
- Detektionstiden påverkas av dosens storlek, användarens metabolism och om bruket är engångs eller regelbundet.

Noggrannhet

- Totalt överensstämmelse: 93,8 % jämfört med referensmetod (GC/MS)
- Analytisk känslighet: Pålitligt positivt vid ≥ 20 ng/mL
- Inga korsreaktioner med vanliga läkemedel eller kosttillskott

Viktig info

- Endast för engångsbruk,
- Förvaras torrt i rumstemperatur (2–30 °C)