

Speichel-Drogentest 6- & 12-Panel


Ausführung

Essen, Trinken, Tabak oder Kaugummi sollten 10 Minuten vor der Probenahme nicht mehr konsumiert werden.

1. Nehmen Sie die Produkte (Testbehälter und Verschlüsse) aus der Verpackung.



2. Schwenken Sie die Spitzen auf beiden Seiten des Mundes und unter der Zunge für mindestens 3 Minuten. Vergewissern Sie sich, dass der gesamte Schwamm an der Spitze getränkt ist, was bedeutet, dass die Probe für den nächsten Schritt bereit ist.

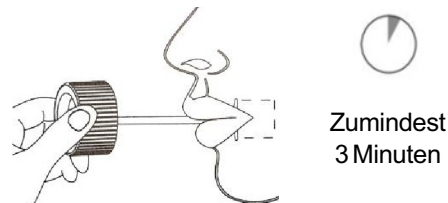


3. Setzen Sie den Deckel auf den Testbehälter und schrauben Sie ihn fest.



4. Entfernen Sie das orangefarbene Etikett vom Testbehälter und lesen Sie die Ergebnisse innerhalb von 3-10 Minuten ab. Wenn alle Linien nach 3 Minuten oder früher sichtbar sind, können die Ergebnisse als negativ interpretiert werden. Wenn eine oder mehrere Linien nach 3 Minuten nicht sichtbar sind, sollten die Ergebnisse erst nach 10 Minuten abgelesen werden.



5. Interpretation der Ergebnisse:

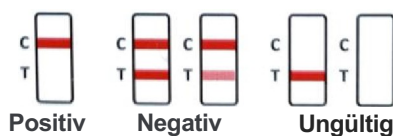

Ungültige Ergebnisse sind in der Regel auf eine unzureichende Speichelmenge zurückzuführen, die im Tupfer gesammelt wurde. Wiederholen Sie in diesem Fall die Probenahme mit einem neuen Test und stellen Sie sicher, dass die Spitze getränkt ist.

Abschalt- und Erkennungszeiten

Drogen	Grenzwert (ng/ml)	Erkennungszeit
Kokain (COC)	20	Ungefähr 1 Tag
Methamphetamin (MET)	50	Ungefähr 1 Tag
Cannabis (THC)	12	etwa 6-8 Stunden
Opiate (OPI)	40	Ungefähr 1 Tag
Amphetamin (AMP)	50	Ungefähr 1 Tag
Oxycodon (OXY)	20	Ungefähr 1 Tag
Zopiclon, Imovane® (ZOP)	50	Ungefähr 1 Tag
Methadon (MTD)	30	Ungefähr 1 Tag
Gewürz, synthetisches THC (K2)	25	Ungefähr 1 Tag
Ecstasy (MDMA)	50	Ungefähr 1 Tag
Benzodiazepine (BZO)	50	Ungefähr 1 Tag
Ketamin (KET)	50	Ungefähr 1 Tag
Fentanyl (FTY)	20	Ungefähr 1 Tag
Tramadol (TML)	30	Ungefähr 1 Tag
Buprenorphin/Subutex (BUP)	10	Ungefähr 1 Tag