

Test salivaire de dépistage de drogues 6 panneaux et 12 panneaux


Exécution

La nourriture, les boissons, le tabac ou le chewing-gum ne doivent pas être consommés 10 minutes avant le prélèvement.

1. Retirer les produits (récipients de test et couvercles) de l'emballage.




2. Agiter les embouts des deux côtés de la bouche et sous la langue pendant au moins 3 minutes. Assurez-vous que toute l'éponge de l'embout est imbibée, ce qui indique que l'échantillon est prêt pour l'étape suivante.

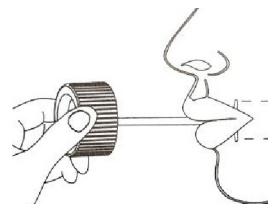

Au moins
3 minutes

3. Insérez le couvercle dans le récipient de test et vissez-le.

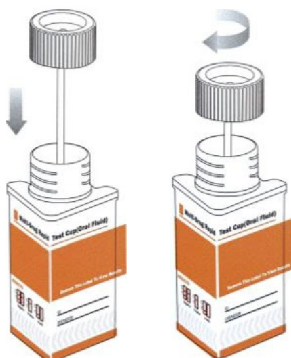


4. Retirez l'étiquette orange de l'emballage du test et lisez les résultats dans les 3 à 10 minutes. Si toutes les lignes sont visibles après 3 minutes ou avant, les résultats peuvent être interprétés comme négatifs. Si une ou plusieurs lignes ne pas visibles après 3 minutes, les résultats ne doivent être lus qu'après 10 minutes.



3 à 10 minutes

5. l'interprétation des résultats :

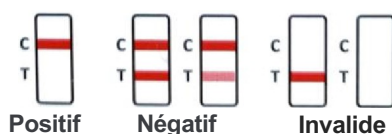

Les résultats non valables sont généralement dus à une quantité insuffisante de salive recueillie dans l'écouvillon. Dans ce cas, répétez l'échantillonnage avec un nouveau test et assurez-vous que le trayon est imbibé.

Temps de coupure et de détection

Médicaments	Seuil (ng/ml)	Temps de détection
Cocaïne (COC)	20	Environ 1 jour
Méthamphétamine (MET)	50	Environ 1 jour
Cannabis (THC)	12	environ 6-8 heures
Opiacés (OPI)	40	Environ 1 jour
Amphétamine (AMP)	50	Environ 1 jour
Oxycodone (OXY)	20	Environ 1 jour
Zopiclone, Imovane® (ZOP)	50	Environ 1 jour
Méthadone (MTD)	30	Environ 1 jour
Spice, THC synthétique (K2)	25	Environ 1 jour
Ecstasy (MDMA)	50	Environ 1 jour
Benzodiazépines (BZO)	50	Environ 1 jour
Kétamine (KET)	50	Environ 1 jour
Fentanyl (FTY)	20	Environ 1 jour
Tramadol (TML)	30	Environ 1 jour
Buprénorphine/Subutex (BUP)	10	Environ 1 jour