

Speekseltest 6-panels & 12-panels


Uitvoering

Eten, drinken, tabak of kauwgom mag 10 minuten voor de monstername niet worden genuttigd.

1. Haal de producten (testcontainers en doppen) uit de verpakking.




2. Zwaai de topjes aan beide kanten van de mond en onder de tong gedurende minstens 3 minuten. Zorg ervoor dat het hele sponsje op het uiteinde doordrenkt is, wat aangeeft dat het monster klaar is voor de volgende stap.

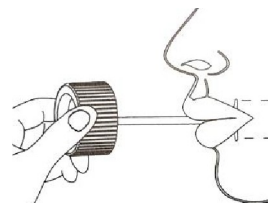


Ten minste
3 minuten

3. Plaats de dop in de testcontainer en schroef hem vast.

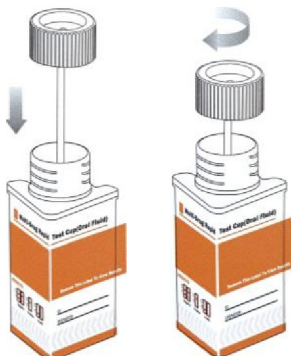


4. Verwijder het oranje etiket van de testverpakking en lees de resultaten binnen 3-10 minuten af. Als alle lijnen na 3 minuten, of eerder, zichtbaar zijn, kunnen de resultaten als negatief worden geïnterpreteerd. Als een of meer lijnen na 3 minuten niet zichtbaar zijn, moeten de resultaten pas na 10 minuten worden afgelezen.

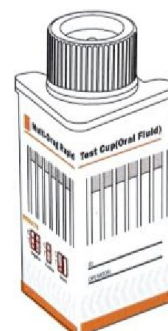

3 tot 10 minuten

5. interpretatie van resultaten:

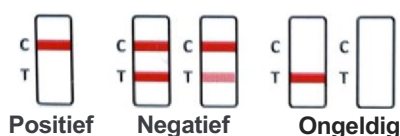

Ongeldige resultaten zijn meestal te wijten aan een onvoldoende hoeveelheid speeksel in het wattenstaafje. Herhaal in dit geval de monstername met een nieuwe test en zorg ervoor dat de speen doordrenkt is.

Afsluit- en detectietijden

Drugs	Afkapwaarde (ng/ml)	Detectietijd
Cocaïne (COC)	20	Ongeveer 1 dag
Methamfetamine (MET)	50	Ongeveer 1 dag
Cannabis (THC)	12	ongeveer 6-8 uur
Opiaten (OPI)	40	Ongeveer 1 dag
Amfetamine (AMP)	50	Ongeveer 1 dag
Oxicodon (OXY)	20	Ongeveer 1 dag
Zopiclone, Imovane® (ZOP)	50	Ongeveer 1 dag
Methadon (MTD)	30	Ongeveer 1 dag
Spice, synthetische THC (K2)	25	Ongeveer 1 dag
XTC (MDMA)	50	Ongeveer 1 dag
Benzodiazepinen (BZO)	50	Ongeveer 1 dag
Ketamine (KET)	50	Ongeveer 1 dag
Fentanyl (FTY)	20	Ongeveer 1 dag
Tramadol (TML)	30	Ongeveer 1 dag
Burprenorfine/Subutex (BUP)	10	Ongeveer 1 dag