

Finnish

Ohjeet

Sylkitesti kannabikselle (THC)

Tämä pikatesti on tarkoitettu THC:n (kannabiksen vaikuttava aine) havaitsemiseen syljestä. Testi on kvalitatiivinen, eli se kertoo, onko THC:n pitoisuus yli vai alle tietyn raja-arvon – tässä tapauksessa 50 ng/mL. Tulos osoittaa, onko henkilö käyttänyt kannabista äskettäin, ja havaitsemisikkuna on jopa 14 tuntia käytön jälkeen.

Testin suorittaminen:

1. Valmistelu:


Käyttäjä ei saa syödä, juoda, pureskella purukumia tai tupakoida 10 minuuttiin ennen testiä.

2. Sylkinäytteen otto:

- Poista testitikun suojus.
- Paina kielen kärki hampaaita ja ikeniä vasten syljenerityksen lisäämiseksi.
- Vie testitikun sieni suuhun ja pyyhkäise sillä ikeniä molemmilta puolilta (10–15 kertaa).
- Aseta sieni sitten kielen alle, kunnes nestettä alkaa liikkua testin ikkunassa (noin 60 sekuntia).

3. Tuloksen lukeminen:

- Aseta testi tasaiselle alustalle.
- Lue tulos 3–10 minuutin kuluttua.
- Älä lue tulosta 10 minuutin jälkeen.

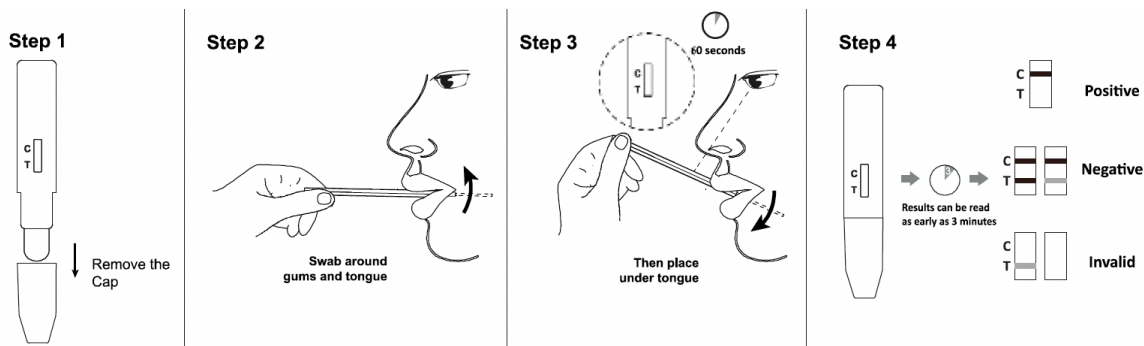

Tulosten tulkinta:

NEGATIIVINEN: Näkyvissä on kaksi värillistä viivaa (yksi kontrollialueella C, yksi testialueella T). Tämä tarkoittaa, että THC-pitoisuus on alle 50 ng/mL.

POSITIIVINEN: Vain yksi viiva näkyy kontrollialueella C. Testialueella T ei näy viivaa. Tämä tarkoittaa, että THC-pitoisuus on yli 50 ng/mL.

MITÄTÖN: Kontrollialueella C ei näy viivaa → testi epäonnistui. Toista testi uudella testitikulla.

Huom: Kaikkia testiviivan värisävyjä pidetään negatiivisena tuloksena.

Luotettavuus:

Testiä on verrattu laboratoriomenetelmiin, kuten GC/MS ja LC/MS:

- Herkkyys (todelliset positiiviset): 96,2 %
- Spesifisyys (todelliset negatiiviset): 97,1 %
- Kokonaisvastaavuus laboratoriotulosten kanssa: 96,8 %

Tämä tarkoittaa, että testi on erittäin luotettava, mutta huomioi:

- Positiivinen pikatestitulostulisi varmistaa laboratoriotestillä oikeudellisia tai lääketieteellisiä tarkoituksia varten.
- Negatiivinen tulos ei aina sulje pois THC:n esiintymistä – pieni annos tai virheellinen näytteenotto voi vaikuttaa tulokseen.

Säilytys:

Säilytä testi avaamattomassa pakkauksessa 2–30 °C:ssa. Ei saa jäädyttää. Älä käytä viimeisen käyttöpäivän jälkeen.