




Test de dépistage des drogues

Panneau unique & panneau multiparamétrique

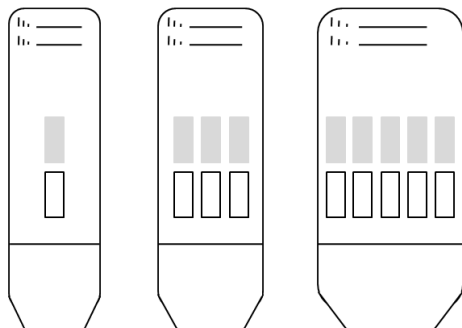

Comment fonctionne le test ?

Le dos de l'emballage indique l'abréviation de la substance testée par votre test de dépistage. Un test rapide en une seule étape pour la détection de plusieurs drogues et métabolites de drogues dans l'urine.

Substance	Abréviation	Seuil de détection	Durée approximative de détection *
Cannabis	(THC)	200 ng/ml	10-15 jours
Cannabis	(THC)	50 ng/mL	15-30 jours
Cannabis	(THC)	20 ng/ml	15-40 jours
Cocaïne	(COC)	300 ng/mL	2-4 jours
Méthamphétamine	(MET)	1000 ng/mL	3-5 jours
Buprénorphine	(BUP)	10 ng/mL	3-6 jours
Oxycodone	(OXY)	100 ng/mL	2-4 jours
Opiacés	(OPI)	2000 ng/mL	2-4 jours
méthadone	(MTD)	300 ng/mL	10-14 jours
Tramadol	(TML)	100 ng/mL	3-4 jours
Benzodiazépines	(BZO)	300 ng/mL	3-7 jours
Amphétamine	(MPA)	1000 ng/mL	2-4 jours
Méthylènedioxyméthamphétamine (Ecstasy)	(MDMA)	500 ng/mL	1-3 jours
Kétamine	(KET)	1000 ng/mL	2-3 jours
Propoxyphène	(PPX)	300 ng/ml	1-2 jours
Fentanyl	(FYL)	200 ng/ml	1-3 jours

* Toutes les durées de détection sont approximatives, car l'élimination des substances varie selon les individus. Pour le cannabis, la durée de détection peut varier considérablement en fonction de la consommation de l'utilisateur.

Contenu


- Panneau de test

Matériel nécessaire à la réalisation du test

- Récipient pour l'échantillon d'urine
- Minuteur
- Panneau de test

Procédure

1. Retirez le panneau de test de son emballage en aluminium.
2. Retirez le capuchon protecteur pour exposer la partie absorbante.
3. Recueillez un échantillon d'urine dans un récipient propre et sec, puis plongez verticalement le test dans l'urine. Laissez-le immergé pendant 10 à 15 secondes. ATTENTION ! L'urine ne doit pas dépasser le repère de flèche sur le test.
4. Retirez le test de l'urine et placez-le sur une surface plane et sèche. Démarrez un minuteur et lisez le résultat dans 5 minutes. ATTENTION ! Ne lisez pas le résultat après 10 minutes.

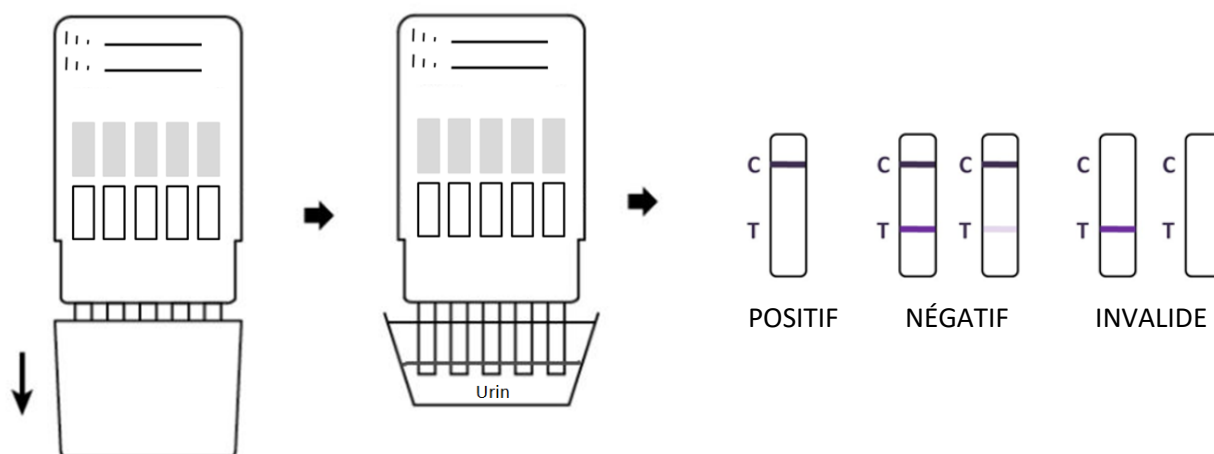

Interprétation du résultat :

POSITIF : Une ligne rouge apparaît dans la zone de contrôle (C). Aucune ligne n'apparaît dans la zone de test (T). Ce résultat positif indique que la concentration de drogue est au-dessus du seuil détectable.

NÉGATIF:* Deux lignes apparaissent. Une ligne rouge doit être présente dans la zone de contrôle (C) et une seconde ligne rouge ou rose bien visible dans la zone de test (T). Ce résultat négatif indique que la concentration de drogue est en dessous du seuil détectable.

*REMARQUE : la nuance de la couleur rouge dans la zone de test (T) peut varier, mais le test doit être considéré comme négatif s'il est même un peu plus foncé que la ligne de contrôle (C).
être considéré comme négatif s'il s'agit même d'une légère ligne rose.

INVALIDE : La ligne de contrôle n'apparaît pas. Un volume d'échantillon insuffisant ou une mauvaise manipulation sont les raisons les plus probables de ce résultat invalide. Vérifiez la procédure et répétez le test avec une nouvelle bandelette. Si le problème persiste, arrêtez la procédure et contactez votre fournisseur local.

Stockage et durée de conservation

1. Conservez à 2°C - 30°C dans un sachet scellé jusqu'à la date de péremption.
2. Ne pas congeler. Protégez de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la chaleur.
3. Une fois l'emballage en aluminium ouvert, utilisez immédiatement le test. Une exposition prolongée à l'humidité réduit la fiabilité du produit.
4. N'ouvrez pas l'emballage en aluminium avant d'être prêt à effectuer le test.
5. Ne pas utiliser après la date de péremption.