


Drugstest

Voor panelen 1-12

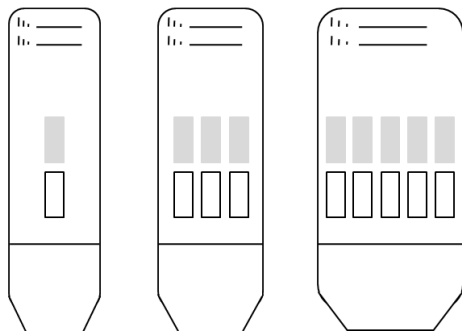

Hoe werkt de test?

De afkorting waar je drugstest op test, staat op de achterkant van de verpakking. Een snelle test in één stap voor de detectie van meerdere drugs en drugmetabolieten in urine.

Stof	Afkorting	Afgesneden	Detectietijd bij benadering*
Cannabis	(THC)	200 ng/ml	10-15 dagen
Cannabis	(THC)	50 ng/mL	15-30 dagen
Cannabis	(THC)	20 ng/ml	15-40 dagen
cocaïne	(COC)	300 ng/mL	2-4 dagen
Methamfetamine	(MET)	1000 ng/ml	3-5 dagen
Buprenorfine	(BUP)	10 ng/mL	3-6 dagen
Oxycodon	(OXY)	100 ng/ml	2-4 dagen
Opiaten	(OPI)	2000 ng/mL	2-4 dagen
methadon	(MTD)	300 ng/mL	10-14 dagen
Tramadol	(TML)	100 ng/ml	3-4 dagen
Benzodiazepinen	(BZO)	300 ng/mL	3-7 dagen
amfetamine	(MPA)	1000 ng/ml	2-4 dagen
Methyleendioxymethamfetamine (ecstasy)	(MDMA)	500 ng/ml	1-3 dagen
Ketamine	(KET)	1000 ng/ml	2-3 dagen
Propoxyfeen	(PPX)	300 ng/ml	1-2 dagen
Fentanyl	(FYL)	200 ng/ml	1-3 dagen

* Alle detectietijden zijn relatief, omdat de snelheid waarmee het lichaam stoffen uitscheidt individueel is. Voor cannabis kan de detectietijd sterk variëren, afhankelijk van de verslaving van de persoon

Inhoud


- Testpaneel

Materialen die nodig zijn om de test uit te voeren

- Monsterhouders
- Timer
- Testpaneel

Uitvoering

1. Haal het testpaneel uit de foliezak.
2. Trek de beschermhuls eraf om het zuiggedeelte bloot te leggen.
3. Vang urine op in een schoon, droog bakje en dompel het testapparaat er verticaal in. Laat het ongeveer 10-15 seconden in de urine staan. **OPMERKING!** Laat de urine niet over de "pijl"-markering op het testapparaat lopen.
4. Haal het testapparaat uit de urine en plaats het op een vlakke, droge ondergrond. Start de timer en lees het resultaat binnen 5 minuten af. **OPMERKING!** Lees het resultaat niet af na 10 minuten.

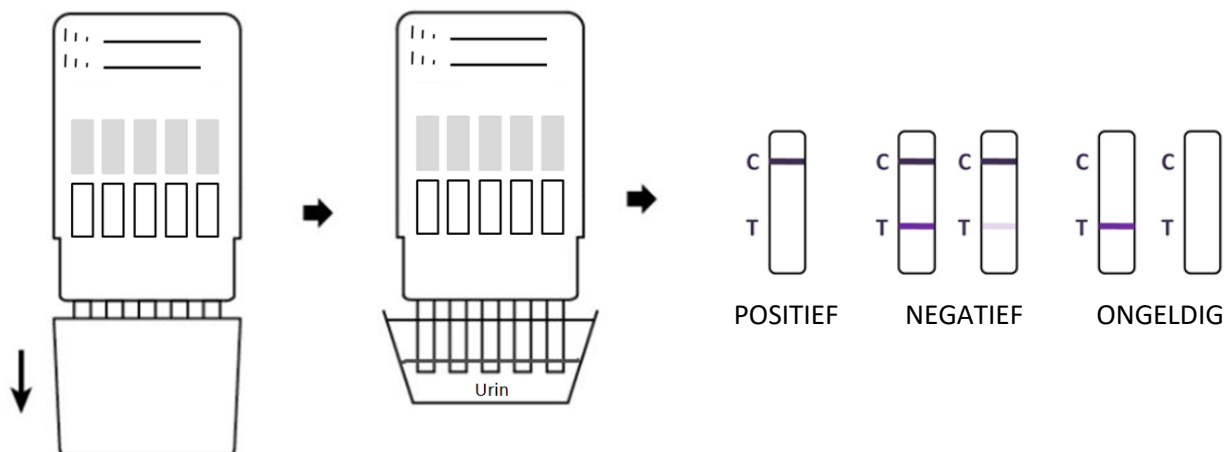

Interpretatie van het resultaat:

POSITIEF: Er verschijnt een rode lijn in het controlegebied (C). Er verschijnt geen lijn in het testgebied (T). Dit positieve resultaat geeft aan dat de geneesmiddelconcentratie boven het detecteerbare niveau ligt.

NEGATIEF: Er verschijnen twee lijnen. Eén rode lijn moet zich in het controlegebied (C) bevinden en een aangrenzende duidelijke rode of roze lijn moet zich in het testgebied (T) bevinden. Dit negatieve resultaat geeft aan dat de geneesmiddelconcentratie onder het detecteerbare niveau ligt.

OPMERKING: De tint van de rode kleur in het testgebied (T) kan variëren, maar de test moet als negatief worden beschouwd als er zelfs maar een rode of roze lijn te zien is.

ONGELDIG: De controlelijn verschijnt niet. Onvoldoende monstervolume of onjuiste uitvoering zijn de meest waarschijnlijke redenen waarom de controlelijn niet verschijnt. Controleer de procedure en herhaal de test met een nieuwe teststrip. Als het probleem aanhoudt, stop dan de procedure en neem contact op met uw leverancier of plaatselijke distributeur.

Opslag en houdbaarheid

1. Bewaren bij 2°C - 30°C in een afgesloten verpakking tot de vervaldatum.
2. Niet invriezen. Buiten direct zonlicht, vocht en hitte bewaren.
3. Zodra de folieverpakking is geopend, moet de test onmiddellijk worden gebruikt. Langdurige blootstelling aan vocht vermindert de betrouwbaarheid van het product.
4. Open de folieverpakking pas wanneer u klaar bent om de test uit te voeren.
5. Niet gebruiken na de vervaldatum.