

Drogtest Multi 6 & 12 - Saliv

Detta CE godkända snabbtest är för kvalitativ detektion av droger och deras metaboliter i human saliv. Testet är avsett för professionellt bruk som ett screeningverktyg.

Droger som omfattas av testet och gränsvärden


Substans	Förkortning	Gränsvärde (ng/mL)	Ungefärlig detektionstid i saliv
Amfetamin	AMP	50	24–48 timmar
THC (Cannabis)	THC	12	upp till 24 timmar
Opiater	OPI	40	24–36 timmar
Bensodiazepiner	BZO	50	24–72 timmar
Kokain	COC	20	24–48 timmar
Metamfetamin	MET	50	24–48 timmar
Oxykodon	OXY	50	24–48 timmar
Ecstasy (MDMA)	MDMA	50	24–48 timmar
Tramadol	TML	30	24–48 timmar
Barbiturater	BAR	50	24–72 timmar
Spice (K2)	K2	25	upp till 24 timmar
Fencyklidin "ängladamm"	PCP	10	24–72 timmar

* Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena.


Utförande

Mat, dryck, tobak eller tuggummi skall ej intagas 10 minuter före provtagning.

1. Ta ut produkterna (testbehållare & tops) från förpackningen.
2. För runt topsen på båda sidor av munnen och under tungan i minst 3 minuter. Se till att hela svampen på topsen är genomvåt, vilket indikerar att provet är klart för nästa steg.

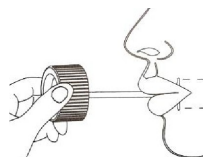

3. För ner topsen i testbehållaren och skruva fast den.

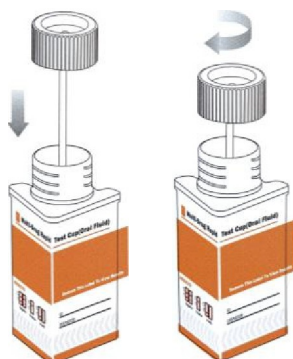


4. Avlägsna den orangea etiketten från testbehållaren och avläs resultaten inom 3-10 minuter. Om alla streck är tydliga efter 3 minuter, eller tidigare, kan resultaten tolkas som negativa. Om ett eller flera streck inte är synliga efter 3 minuter, skall resultaten först avläsas efter 10 minuter.



Tolkning av resultat

- **Negativt:** Två linjer visas – en vid kontrollinjen (C) och en vid testlinjen (T).
- **Positivt:** Endast en linje visas vid kontrollinjen (C); ingen linje vid testlinjen (T).
- **Ogiltigt:** Ingen linje vid kontrollinjen (C); testet måste göras om.

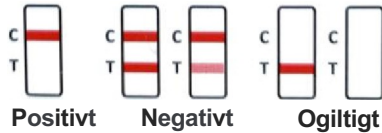

Ogiltigt resultat beror oftast på att otillräcklig mängd saliv har samlats upp i topsen. Repetera då provtagningen med ett nytt test och säkerställ att topsen är genomvåt.

Korsreaktivitet - Falskt positiva resultat

Följande ämnen har rapporterats kunna orsaka falskt positiva resultat eller korsreaktioner i immunologiska drogtestar.

Testad substans	Möjliga korsreaktiva ämnen
Amfetamin (AMP)	Bupropion, pseudoefedrin, fenylefrin, Selegilin, Vissa antidepressiva (t.ex. tricykliska)
THC (Cannabis)	Ibuprofen (sällsynt), protonpumpshämmare (t.ex. pantoprazol kan störa)
Opiater (OPI)	Kodin, Morfin, vissa hostmediciner
Bensodiazepiner (BZO)	Sertralin, oxaprozin
Kokain (COC)	Lidokain, vissa anestetika (sällsynt)
Metamfetamin (MET)	Samma korsreaktioner som amfetamin (efedrin, pseudoefedrin, bupropion, selegilin). Vissa ADHD-mediciner (t.ex. metylfenidat ger ibland korsreaktioner)
Oxykodon (OXY)	Inga kända starka korsreaktioner
MDMA	Samma korsreaktioner som amfetamin/metamfetamin (efedrin, pseudoefedrin, bupropion, selegilin)
Tramadol	Tapentadol (i vissa fall)
Barbiturater	Inga vanliga korsreaktioner
Spice K2	Inga vanliga korsreaktioner
Fencyklidin	Dextrometorfan (hostmedicin), Ketamin, Tramadol, Venlafaxin (antidepressiv), Difenhydramin (antihistamin)

Gränsvärdesvariation (±25 %)

Testet visar hög tillförlitlighet med korrekt utslag vid ±25 % från gränsvärdet för samtliga substanser. Vid testning med prover innehållande 25 % mer eller mindre än gränsvärdet visade testet konsekvent positivt eller negativt resultat med minst 90–95 % träffsäkerhet.

Begränsningar

Testet är ett screeningverktyg och bör följas upp med bekräftande analys (t.ex. GC/MS) vid positivt resultat. Negativa resultat utesluter inte droganvändning om koncentrationen ligger under cut-off.

Förvaring och hållbarhet

1. Förvaras vid 2°C -30°C i förseglad påse fram till utgångsdatum.
2. Frys ej. Förvaras undan direkt solljus, fukt och hetta.
3. När foliepåsen öppnats skall testet användas direkt. Långvarig exponering för luftfuktighet leder till att produktens pålitlighet försämras.
4. Öppna inte folieförpackningen förrän du är klar att utföra testet.
5. Använd ej efter passerat utgångsdatum.

Instruktioner - SVENSKA

Symbolindex

	Bruksanvisning
	Endast för in vitro diagnostisk användning
	Förvara mellan 2-30 °C
	Använd inte om varan är skadad

	Tester per kit
	Använd före
	Lot nummer
	Tillverkare

	Auktoriserad representant
	Återanvänd ej
	Katalog #



EC REP
MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10,
48163 Muenster,
Germany