

PATIENTINFORMATION

DERMABOND* lokalt vävnadslim för hud (2-Octyl Cyanoacrylate) är ett sterilt flytande hudlim bestående av 2-Octyl Cyanoacrylate samt färgämnet D&C violett nr 2. När limmet kommer i beröring med Din hud kommer det att bilda en tunn film som håller samman såret. Filmen håller sårkanterna på plats under 5-10 dagar, tillräckligt med tid för att Ditt sår ska läka. Därefter kommer det naturligt att trilla bort.

Nedanstående punkter kommer att besvara några av Dina frågor samt se till att Du sköter Ditt sår korrekt under läkningstiden.

- **En viss svullnad och rodnad är vanlig vid alla typer av sår. Detta är övergående under sår läkningstiden. Om däremot svullnaden eller rodnaden blir värre eller om Din smärta ökar eller Du känner Dig onormalt varm – kontakta en läkare. Kontakta även läkare om såret går upp.**
- Efter att DERMABOND* har applicerats kommer Ditt sår att glänsa och vara svagt lilafärgat. Därefter kommer filmen att bli frostliknande.
- Skrubba, gnugga eller peta inte på DERMABOND*. Detta kan leda till att limmet lossnar innan Ditt sår är färdigläkt och kan i sin tur innebära att såret går upp. Det kan också leda till skada, infektion eller ärrbildning.

DERMABOND

TOPICAL SKIN ADHESIVE 2-Octyl Cyanoacrylate

- För att förhindra ovanstående kan Din läkare ha placerat ett bandage över Ditt sår. Om så är fallet, håll det torrt och på plats tills DERMABOND* Vävnadslim har trillat bort och såret är förslutet (vanligtvis 5-10 dagar). Du kan byta bandage efter några dagar för att hålla det rent och fräscht men var försiktig vid borttagandet av det gamla bandaget.
- Placera ej tejp till bandaget direkt på DERMABOND-ytan eftersom ett borttagande av tejp också kan ta bort vävnadslimmet. Detta kan innebära att såret går upp.
- Applicera inget flytande läkemedel på Ditt sår så länge DERMABOND* Vävnadslim finns kvar. Dessa läkemedel kan få filmen att lossna innan såret är läkt. Blötlägg och skrubba inte såret samt undvik att simma.
- Du kan då och då snabbt blöta Ditt sår i duschen eller badet. Undvik dock långvarig kontakt med vatten. Torka såret torrt med en mjuk handduk efter duschen eller badet. Om Du har fått ett bandage över såret, ersätt också det med ett nytt, fräscht enligt instruktionerna ovan.
- Effekterna av att exponera Ditt DERMABOND*-behandlade sår för direkt solljus eller solarium är ännu ej kända.