



MUGGBANDAGERING



Om produkten och dess användning

Muggbandagering 14 delar från VetProvide är ett komplett sårvårdskit med allt du behöver för att behandla mugg hos hästar och ponnyer. Kittet innehåller: **klorhexidinschampo**, **alcogel**, **Activon honungsalva**, **nonwoven kompresser**, **polstervadd**, **vetrap**, **klisterlinda** och **engångshandskar**.

Mugg är en hudinfektion som vanligtvis drabbar huden runt nedre delen av benet, precis ovanför hoven. Den orsakas av en kombination av bakterier och svamp och kännetecknas av skorpor, rödhet, svullnad och ömhet. Rätt behandling kräver att skorpona först avlägsnas, såret rengörs noggrant och sedan sköts om med lämpliga produkter.

OBS: Rådgör alltid med din veterinär innan du börjar behandla

Mugg kan i värsta fall fortsätta sprida sig och orsaka allvarligare problem. Denna guide är ett komplement till, inte en ersättning för, veterinär rådgivning. Vid tveksamhet, kontakta alltid din veterinär först.

Vad du behöver

Kittet innehåller redan allt som krävs. Kontrollera att följande ingår innan du börjar:

- **Klorhexidinschampo** – ett rengöringsschampo som dödar bakterier och svamp
- **Alcogel** – rengör huden och minskar bakterier
- **Activon honungsalva** – sårbehandling som motverkar bakterier och dämpar inflammation
- **Nonwoven kompresser** – mjuk kompress med silkig yta som inte fastnar i såret
- **Polstervadd** – stabil och skyddande grundläggning av bandaget
- **Vetrap** – elastisk linda som håller bandaget på plats
- **Klisterlinda** – tejp för extra säkert fäste
- **Engångshandskar** – för din och djurets hygien

Ha dessutom till hands: en ren sax, en ren och torr handduk samt vaselin eller Salicylvaselin (köps separat).

Innan du börjar

- Ställ hästen på ett lugnt och säkert ställe där djuret känner sig tryggt.
- Se till att du har bra belysning och kan nå benet bekvämt.
- Ha alla produkter förberedda och till hands innan du börjar.
- Ta på engångshandskarna innan du rör vid såret eller någon av produkterna.
- Läs igenom hela guiden innan första behandlingen så att du känner dig bekväm med alla steg.
- En video som visar hela förfarandet finns på:
<https://www.youtube.com/watch?v=ii55h5B7WUA>

Steg-för-steg-instruktioner

1

Klipp bort hår runt det drabbade området

Klipp noggrant bort håret runt sårområdet. Hårstrån kan irritera såret och öka risken för infektion. Använd en ren sax eller klippmaskin och undvik att skada den redan känsliga huden.

Tips: Om hästen är stressad av klippningen, ta det lugnt och pausa vid behov.

2

Mjuka upp skorpena

Skorpena skyddar såret i viss mån, men under dem samlas bakterier och svamp. Skorpena måste därför avlägsnas före behandlingen.

Stryk på ett rikligt lager vaselin eller Salicylvaselin över hela det drabbade området. Låt salvan verka i **20 till 60 minuter**, eller längre om skorpena är tjocka och hårda. Salvan mjukar upp skorpena så att de kan tas bort lättare.

OBS: Tvinga aldrig loss en skorpa som sitter fast. Om den inte lossnar lätt, låt salvan sitta längre. Att riva bort en fast skorpa kan orsaka blödning, förstora såret och öka risken för infektion.



3

Ta bort skorpena och skölj av salvan

När skorpena har mjuknat, avlägsna dem varsamt med fingrarna eller en mjuk kompress. Arbeta försiktigt och på ett kontrollerat sätt.

När alla skorpor är borttagna, skölj bort salvasterna noggrant med ljummet vatten. Torka av med en ren och torr handduk.

Se till att all salva är bortspolad – kvarvarande salva kan minska effektiviteten av klorhexidinschampot i nästa steg.

4

Schamponera med klorhexidinschampo

Applicera klorhexidinschampo på det rengörda området och arbeta in det varsamt med fingrarna eller en mjuk kompress. Klorhexidinschampot dödar bakterier och svamp.

Låt schampot verka i upp till 20 minuter. Undvik att hästen rör vid benet under denna tid.

Skölj noggrant av med ljummet vatten så att inga schamporester finns kvar på huden.

Torka det behandlade området noggrant med en ren och torr handduk. Torr hud är viktigt för läkning och för att mugg inte ska förvärras.



5

Rengör med alcogel och kompress

Håll alcogel på en ren nonwoven-kompress och torka av det behandlade området varsamt. Alcogel rengör huden ytterligare och dödar kvarstående bakterier på hudytan.

Låt området lufttorka i några sekunder efter att du använt alcogel, innan du fortsätter med nästa steg.




6

Applicera Activon honungsalva

Stryk ett rikligt lager Activon honungsalva över hela sårområdet. Honungsalvan motverkar bakterier och dämpar inflammation, och stödjer hudens naturliga läkningsprocess.

Täck därefter omedelbart salvan med en nonwoven-kompress. Kompressen har en silkig yta som gör att den inte fastnar i såret när den tas bort.

Se till att kompressen täcker hela området med honungsalva. Använd flera kompresser om det behövs.

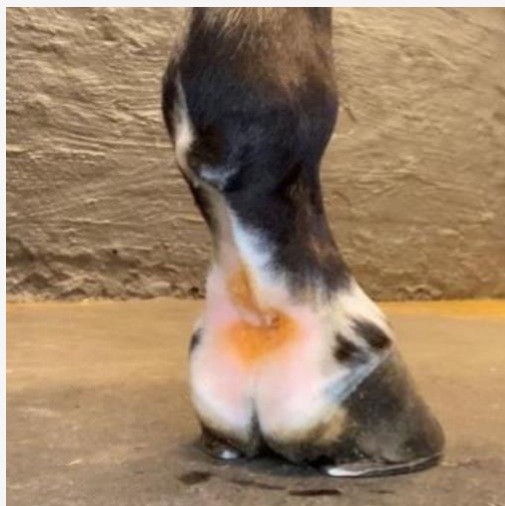

7

Lägg polstervadden

Linda polstervadd jämnt runt benet över kompressen. Polstervadden håller kompressen på plats, ger bandaget stadga och förhindrar att det glider.

Se till att vadden är jämnt fördelad och att det inte bildas veck som kan trycka mot huden.



8

Linda vetrap över polstervadden

Linda vetrap jämnt och med ett lätt och jämnt drag över polstervadden. Vetrap är en elastisk och självhäftande linda som håller hela bandaget på plats.

För att den ska sitta ordentligt och inte glida behöver den läggas med ett litet mått av spänning, men dra den aldrig hårt åt. En linda som dras åt för hårt kan orsaka allvarliga skador på senor och hämma blodcirkulationen.

Enkelt test: Du ska smidigt kunna sticka in ett finger under lindans kanter. Den ska sitta stadigt och ligga an mot benet, men får absolut inte strama eller kännas för hårt åtdragen.



9

Fäst med klisterlinda

Applicera **klisterlindan** längs överkanten av bandaget och upp på hårremmen, samt längs nederkanten och ner över hoven. Linda gärna över tåspetsen för bättre hållbarhet.

VIKTIGT: Klisterlindan är mycket elastisk och självhäftande. Lägg den alltid lätt och försiktigt utan att dra åt.

Sätt ALDRIG klisterlindan direkt över kotleden, kronleden eller hovleden.

Klisterlinda över leder kan begränsa rörligheten och orsaka allvarliga skador.

Klisterlinda fästs på hårremmen och över hoven. Den kan även läggas direkt på huden nedanför bandaget, men lägg den alltid utan att dra åt.



Hur länge och hur ofta

Bandaget kan sitta **upp till 3 dygn** om det hålls torrt och rent. Kontrollera dagligen att bandaget sitter korrekt, att det inte luktar påtagligt, och att hästen inte visar tecken på ökat obehag eller värk.

Om hästen fortfarande har mugg när bandaget byts, eller om det återkommer, upprepa proceduren från steg 1 med nya produkter.

Se till att alltid hålla området torrt mellan behandlingarna. Fukt förvärrar mugg och fördröjer läkning.

Viktiga hygientips

- Tvätta alltid händerna noggrant eller använd engångshandskar under hela behandlingen.
- Använd aldrig produkter vars förpackning är skadad eller vars hållbarhetsdatum har passerats.
- Använd separata kompresser och material för varje behandlingstillfälle.
- Håll hästens box eller liggplats ren och torr för att minska risken för återinfektion.
- Undvik att hästen står i lera, vått gräs eller vått underlag under behandlingsperioden.
- Dela inte material med andra djur. Mugg kan spridas mellan hästar.

När ska du kontakta veterinär?

Kontakta veterinär för rådgivning om något av följande gäller :

- **Du är osäker** på om det är mugg – rådgör alltid med veterinären före första behandlingen.
- Muggen sprider sig, ökar i storlek eller inte har förbättrats efter 3 till 5 dagars behandling.
- Såret blöder, läcker vätska eller visar tydliga tecken på infektion, till exempel stark lukt eller varm svullnad.
- Hästen eller ponyn haltar eller vägrar sätta ned benet.
- Djuret verkar ha ont, äter dåligt eller har ett påverkat allmäntillstånd.
- Muggen återkommer upprepade gånger trots korrekt behandling.

Mugg kan i allvarliga fall leda till djupgående infektioner i huden och underliggande vävnad. Vid tveksamhet, kontakta alltid din veterinär.

Mer information och instruktionsvideo: www.vetprovide.se |
<https://www.youtube.com/watch?v=ii55h5B7WUA>