

Activon Manukahonung



Sårbehandling...
den naturliga vägen

Activon Tulle®

Kompress med Manukahonung

Produktbeskrivning

Activon Tulle är en viskos kompress mättad med 100% Manukahonung. Activon Tulle skapar en fuktig sår-läkningsmiljö, tar bort odör samt har en antiseptisk effekt. Lämpligt för ytliga eller granulerande sår samt för debridering eller upprepning av nekrotiskt eller oren vävnad.

Bruksanvisning

Öppna förpackningen. Ta ut kompressen och placera förbandet över såret. Täck med lämpligt förband ex. Eclipse beroende på exudatmängd. Förvaras i rumstemperatur. Vid kraftigt infekterade sår kan Activon Tulle kombineras med extra Manukahonung med Activon tube

Användningsområde

- Bensår
- Trycksår
- Illaluktande sår
- Maligna tumörsår
- Torra, orena eller nekrotiska sår

Fördelar

- Antiseptiskt
- Antiinflammatoriskt
- Minskar odör
- Osmotisk effekt
- Bibehåller en fuktig sår-läkningsmiljö
- Fastnar inte i såret



Orderinformation

Artnr	Beskrivning	Storlek	Avd.förp
CR 3761	Activon Tulle	5x5cm	5st
CR 3658	Activon Tulle	10x10cm	5st
CR 3830	Activon Tube	25 gram	12st

