

FACE SHIELD MODELL P

Bruksanvisning

Face Shield Modell P är tillverkad av polypropylen och polyetylen som gör produkten hygienisk och säker att använda. Materialen är lätt att tvätta av och har god beständighet mot alkoholer, går utmärkt att tvätta av med handsprit.

- Innehåller inga giftiga eller allergiframkallande ämnen,
- Hög slagåtlighet och elasticitet för hög hållfasthet,
- Lätta att rengöra och desinficera,
- Materialen är miljövänliga och lätta att återvinna.



Visiret går att tvätta och använda flera gånger. Efter upprepad tvättning av skyddsfilmen minskar filmens transparens, skyddsfilmen bör då bytas ut för att skyddet ska vara säkert.

OBS! Detta är ett skydd som endast får användas inom vård och omsorg för att skydda mot droppsmitta.


Provad enligt MET5659 utgåva 1 av RISE Research Institutes of Sweden AB och uppfyller kraven med undantag av punkt 4 Klarhet (EN 166 §7.1.2.3 Diffusion of light) och punkt 5 Mekanisk tålighet (EN166 §7.1.4.2 Increased robustness). Denna produkt får inte säljas vidare på den öppna marknaden.




1. Visiret består av två delar, en hållare och en skyddsfilm.



2. Vänd hållaren så att den platta ytan är vänd uppåt.

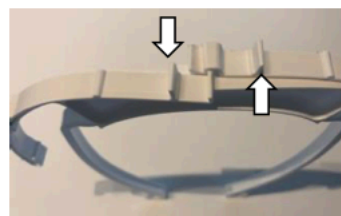


3. Öppna hållarens lås genom att trycka sidorna i motsatt riktning. Se figur ovan.

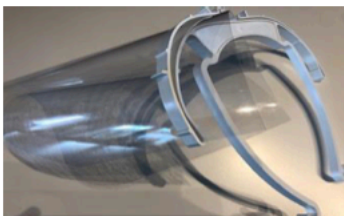

4. Tag skyddsfilmen och applicera ett hörn av filmen i hållarens spalt, dra sedan filmen ända ut i bågens förlängning.




5. Lyft upp filmen i spalten på den andra sidan i hållarens spalt.

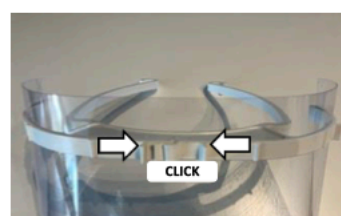


6. Justera filmen så att den sitter rakt i hållaren. Tryck ihop sidorna tills du hör ett klick, hållaren är låst.



7. Visiret är klart att använda, mitten på bågen placeras mot pannan och skalmarna strax över och bakom öronen.

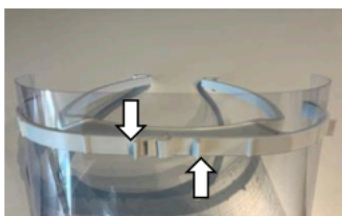

8. För att demontera skyddsfilmen öppnas hållarens lås genom att trycka isär sidorna i motsatt riktning.

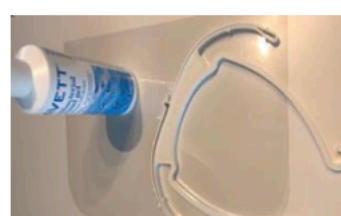

9. Skyddsfilmen och hållaren kan tvättas av med handsprit eller desinfektionsmedel.