




Step by Step Anvisning BLUE LIGHT professional Gel hård



1.

Förberedelse

Jämna ut nagelspetsen och nagelplattan med en diamantfräs, därefter rengör och avfetta med RUCK® NAGELKORRIGERING Cleaner. Ta ut RUCK® NAGELKORRIGERING BLUE LIGHT professional Gel hård 10 minuter före behandlingen från kylskåpet.

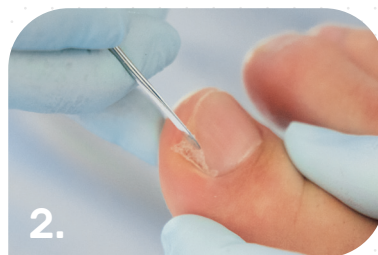

2.

Förtamponering

Dropa peclavus® POD0med Förbehandlingstinktur i nagelfalsen. Låt dra 5-8 minuter för att uppnå ett behagligt lugn. Rengör sedan nagelfalsen samt nagelspetsen igen med nagelfals-instrumentet och tamponera sedan.



3.

Applicera RUCK® Nagelkorrigering BLUE LIGHT professional Gel hård och modellera bygeln

Applicera RUCK® NAGELKORRIGERING BLUE LIGHT professional Gel hård på nageln och forma med nagelfalsinstrumentet. Massan måste modelleras utan tryck och tillplattas mot nagelfalsen. Det är viktigt att se till att gelen inte appliceras högre än 2 mm och inte vidrör nagelfalsen. För bättre vidhäftning, applicera första RUCK® NAGELKORRIGERING Primer med en kompress och låt det lufttorka.



4.

Låt RUCK® Nagelkorrigering BLUE LIGHT professional Gel hård stelna

Efter framgångsrik applicering ska gelen hårdas under 60 sekunder med RUCK® NAGELKORRIGERING BLUE LIGHT professional LED-Lampa. Efter härdningsprocessen bildas ett dispersionsskikt på ytan av bygeln som måste tas bort. Här rekommenderar vi RUCK® NAGELKORRIGERING Cleaner. TIPS: Vid härdning kan nageln, med hjälp av nagelfals-instrumentet eller en tamponad, höjas. Detta ökar spänningen av den modellerade bygeln.



5.

Korrigerar ojämnheter

Ojämnheter i modelleringsbygeln kan korrigeras med en hårdmetallfräs. Observera att den totala höjden på bygeln bör inte vara mer än 2 mm.



6.

Sluttamponera

Byt ut den tidigare tamponaden mot en ny nagelfalstamponad (Copoline). Dropa peclavus® POD0med Efterbehandlingstinktur för en behagligare och lugnare känsla. Låt verka i 5-8 minuter för att få bästa resultat. Modelleringsbygeln växer ut med nageln och kan upprepas beroende utvecklingen av behandlingen.

